



## Загриваща наколеника

ARYD01

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Наколениката е изработена от висококачествен материал, което я прави максимално безопасна и комфортна. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Загриващ ефект за обезболяващо и противовъзпалително действие.
- За профилактика при травми на коленната става при спортни дейности и физически труд.
- За рехабилитация след травми и операции на коленната става.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Анатомичният дизайн на продукта спомага за по-доброто му прилягане към тялото и дава по-голям комфорт при носене.
- Наколениката е изработена от съвременния материал АКРИЛНА ВЪЛНА, който има забележителен загреващ ефект.

[www.prolife-orto.com](http://www.prolife-orto.com)

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,  
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставяте наколенката като я обуете от по-широката и страна. Подходяща е за десен и ляв крак.

### СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате продукта се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на продукта е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставяте продукта върху клин. Не поставяйте наколенката при използване на загреващи гелове в областта на коленната става.

Избирайте размера по обиколката на коляното, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на коляното, см	34 – 36	36 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47



При измерване на обиколката на коляното сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

### НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ



### ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Наколенката не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

**Състав:** акрилна вълна 60%,полиестер 20%,еластан 20%.

**Съхранение:** да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C , далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

**Срок на годност:** 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

**Дата на производство:** виж опаковката.

**Размер:** виж опаковката.

CE ISO 9001  
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.  
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey