


prolife orto

Загряващ
пояс



Следоперационен
колан за кръст

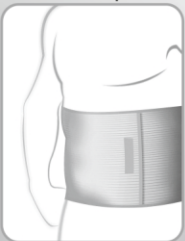


Ортопедичен пояс
за кръст




Ортопедичен пояс
за кръст



Поддържащ колан
за бременни

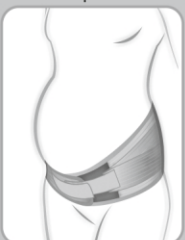

Поддържащ бандаж
за ръка

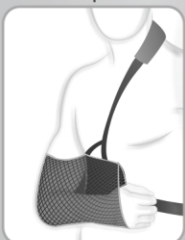


Ортопедичен колан
за коригиране на стойката



Ортопедичен детски колан
за коригиране на стойката



Кръсто-гърбначен
(дорсо-лумбален) корсет

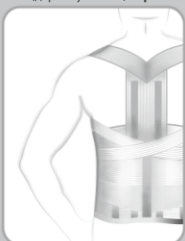

prolife orto


Ортеза за коляното
с отвор за пателата




Ортеза за коляното
с отвор за пателата



Загряваща
наколенка

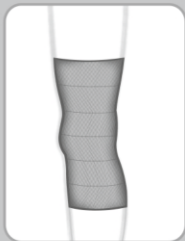

Наколенка с гъвкави
метални банели

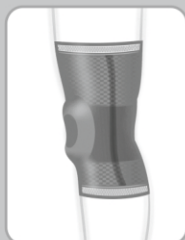

Наглезенка



Ортопедична
наглезенка



prolife orto

Наколенка с гъвкави метални банели

ARK9103

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Наколенката е изработена от висококачествен материал, което я прави максимално безопасна и комфортна. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За лечение на травми, частични увреждания на коленните връзки на коленната става.
- За профилактика на травми на коленната става при спортни занимания и физически труд.
- За рехабилитация след травми и операции на коленната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Наколенката е подсилена със силиконов пръстен, който допълнително стабилизира пателата (капачката на коляното), предпазва я и намалява болката.
- Гъвкавите банели дават допълнителна опора и намаляват напрежението върху ставата при движение. Също не позволяват усукване на наколенката при носене.
- Специалната плетка в краищата не позволява усукване/навиване на наколенката и предотвратява притискане на меките тъкани.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Вградените силиконови ленти предотвратяват приплъзване на наколениката и осигуряват комфорт при носене.
- Наколениката е изработена от въздухо- и влагопропусклив материал, създаден по уникална технология на триизмерна плетка. Оптимално следва контура на тялото и има стягащ ефект само в проблемните зони.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обуйте наколениката от по-широката ѝ страна. Подходяща е за десен и за ляв крак.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да използвате наколениката се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повредено продукта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на наколениката е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някои от материалите задължително трябва да поставяте наколениката върху бельо. Не поставяйте наколениката при използване на загряващи гелове в областта на коленната става.

Избирайте размера по обиколката на коляното, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на коляното, см	34 – 36	36 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47



При измерване на обиколката на коляното сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ



ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки наколениката. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Наколениката не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиамид 55%, еластан 45%, силиконов пръстен, 2 гъвкави метални банела.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey