


prolife orto

Загряващ
пояс



Следоперационен
колан за кръст

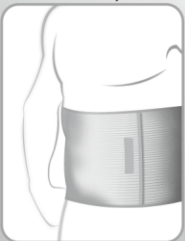


Ортопедичен пояс
за кръст




Ортопедичен пояс
за кръст



Поддържащ колан
за бременни

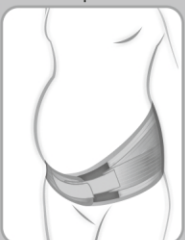

Поддържащ бандаж
за ръка

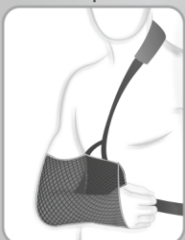


Ортопедичен колан
за коригиране на стойката



Ортопедичен детски колан
за коригиране на стойката



Кръсто-гръбначен
(дорсо-лумбален) корсет

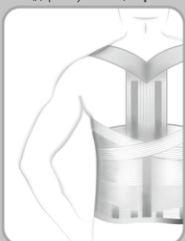

prolife orto

Ортеза за коляното
с отвор за пателата




Ортеза за коляното
с отвор за пателата



Загряваща
наколенка



Наколенка с гъвкави
метални банели

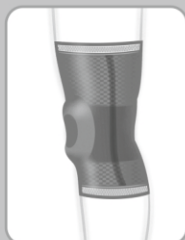

Наглезенка



Ортопедична
наглезенка



prolife orto

Ортопедична наглезенка

ARA9400

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Наглезенката е изработена от висококачествен материал, което я прави максимално безопасна и комфортна. Високото качество на продукта е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За профилактика на разтегнати връзки на глезенната става.
- За профилактика на травми на глезенната става при спортни дейности и интензивни физически натоварвания.
- За рехабилитация след травми и операции на глезенната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Анатомичният дизайн на ортопедичната наглезенка спомага за по-доброто му прилягане към тялото и осигурява по-голям комфорт при носене.
- Специална плетка в краищата не позволява усукване/ навиване на наглезенката и предотвратява притискане на меките тъкани.
- Наглезенката е изработена от въздухо- и влаго-пропусклив материал, създаден по уникална технология на триизмерна плетка. Оптимално следва контура на тялото и има стягащ ефект само в проблемните зони.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРИЛОЖЕНИЕ

Точният размер на наглезенката се определя по обиколката на глезенната става на нивото на кокалчето. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекаря.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Преди да започнете да използвате продукта се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на ортопедичната наглезенка е противопоказана при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някои от материалите задължително трябва да поставяте наглезенката върху чорап. Не поставяйте изделиято при използване на загреващи гелове в областта на глезенната става.


Избирайте размера по обиколката на глезенната става на нивото на кокалчето, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на глезенната става на нивото на кокалчето, см	24 – 26	26 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37

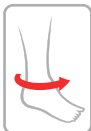

При измерване на обиколката на глезенната става, сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

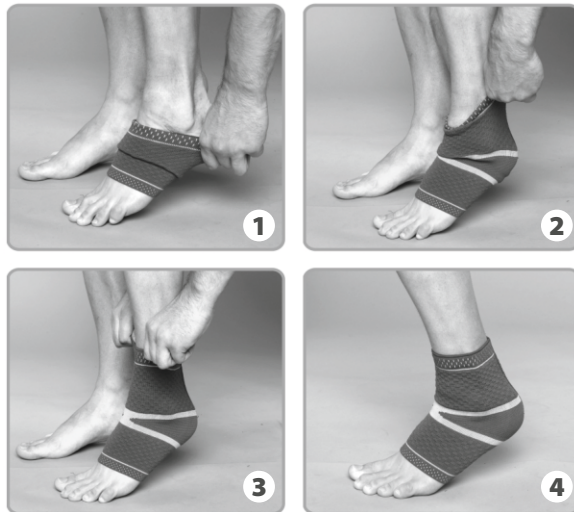

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки ортопедичната наглезенка. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Ортопедичната наглезенка не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиамид 55%, еластан 45%

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey