

## ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Преди пране извадете металните и пластмасовите банели. Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки корсета. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

**Състав:** памук 40%, найлон 30%, поливискон 15%, еластан 15%, велкро лента, 2 метални банела, 4 пластмасови банела.

**Съхранение:** да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

**Срок на годност:** 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

**Дата на производство:** виж опаковката.

**Размер:** виж опаковката.


CE ISO 9001  
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.  
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey

[www.prolife-orto.com](http://www.prolife-orto.com)

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,  
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

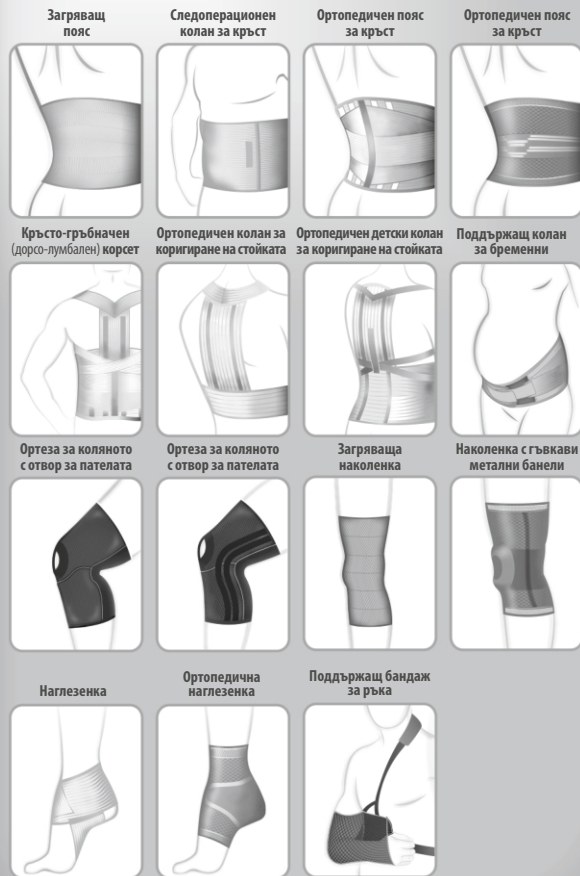

## Кръсто-гърбначен (дорсо-лумбален) корсет

ARC330K

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Корсетът е изработен от висококачествен материал, който съдържа 40% памук, което го прави максимално безопасен и комфортен. Наличието на 6 банела осигурява плътно прилягане, което повишава неговата ефективност и фиксиращо действие. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

### ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- При изкривявания на гърдната област на гърбначния стълб (кифоза, сколиоза I и II степен).
- За профилактика на прегърбването и различни нарушения на стойката.
- За рехабилитация след травми и операции на гърдната и поясната области на гърбначния стълб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Корсетът е направен от устойчив материал с висока въздухопропускливост, който позволява използването на продукта през всеки сезон. Еластичността спомага за допълнителна фиксация и поддръжка.
- Корсетът има допълнителни еластични колани, които подсилват фиксацията на гърбначния стълб и улесняват поставянето му съобразно размера.
- Наличието на твърди банели намалява натоварването върху гърбначния стълб и осигурява надеждна поддръжка в гърдната и поясната му област.
- Допълнителната сменяема вложка осигурява плътно прилягане на корсета към тялото за по-силна фиксация в кръста.
- Вграденият джоб за пристягане помага за поставяне без допълнителни усилия.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

В легнало положение, върху твърда или полу-твърда повърхност, поставете корсета върху бельото. Широката му част трябва да бъде отзад на кръста. Поемете дълбоко въздух, приберете корема и го закрепете върху коремната област с велкро лентата. Допълнително фиксирайте еластичните колани с помощта на велкро лепенките. Коригирайте напасването на корсета спрямо особеностите на фигурата.

**ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА**

От 2 до 12 часа дневно, в зависимост от състоянието и препоръките на лекар. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекар. Необходимостта от продължително носене и предписаният курс на лечение, трябва да се съгласуват с лекар. Не спирайте използването без консултация с лекар.

**СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ**


Преди да започнете да използвате корсета се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на корсета. Не се допуска използване на повреден корсет.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Употребата на корсета е противопоказна при локални заболявания на кожата и бременност. При хиперчувствителност към някои от материалите задължително трябва да поставят корсета върху бельото. Не поставяйте при използване на загаряващи гелове в областта на кръста.



**Избирайте размера по обиколката на талията, съгласно таблицата:**

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на талията, см	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120

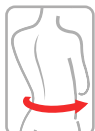

При измерване на обиколката на талията сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

**СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ**

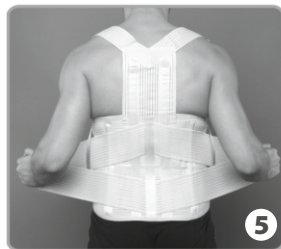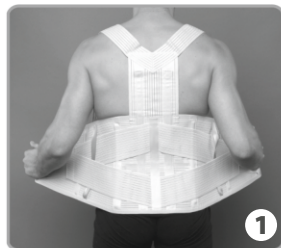

**СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ**

