

### ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Преди пране извадете металните банели. Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

**Състав:** памук 40%, найлон 30%, поливискон 15%, еластан 15%, велкро лента, 2 метални банела.


**Съхранение:** да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

**Срок на годност:** 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

**Дата на производство:** виж опаковката.

**Размер:** виж опаковката.

CE ISO 9001  
ISO 13485

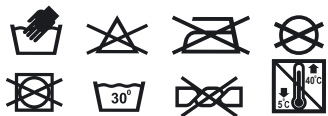

Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.  
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey

[www.prolife-orto.com](http://www.prolife-orto.com)

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,  
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland



## Ортопедичен колан за коригиране на стойката

ARC161

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Продуктът е изработен от висококачествен материал, който съдържа 40% памук, което го прави максимално безопасен и комфортен. Банелите осигуряват максимално ефективно действие на продукта. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Подпомага формирането на правилна стойка при деца и възрастни
- За профилактика на прегърбването, различни нарушения на стойката
- Спомага за намаляването на болки с различен произход в областта на гръбначния стълб и гръдния кош.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Твърдите банели спомагат за изправяне на гърба и осигуряват правилна стойка.
- Велкро лентата осигурява надеждна фиксация и го прави удобен за ползване.
- Продуктът е направен от устойчив материал с висока въздухопропускливост, който позволява използването на продукта през всеки сезон. Еластичността спомага за допълнителна фиксация и поддръжка.

- Меките подложки на презрамките разпределят равномерно натоварването и предотвратяват протриването на кожата.
- Съдържанието на естествен памук прави продукта въздухопропусклив, осигурява нежно прилягане към кожата и издръжливост при носене.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставяйте продукта върху бельото. Закрепете го върху коремната област с велкро лентата. Убедете се, че банелите са поставени симетрично на гръбначния стълб. След това прекарайте презрамките подмишниците, къстосайте ги на гърба, след което с изправене рамене ги изпънете и закрепете отпред подгърдите.

#### ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Деца 6–10 години – от 1–2 часа дневно, с постепенно увеличение до 8–10 часа. Деца 11–16 години – от 2–4 часа с постепенно увеличение до 10–12 часа. Възрастни – цял ден. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекар. Необходимостта от по-продължително носене и предписаният курс на лечение, трябва да се съгласува с лекар. Не спирайте използването без консултация с лекар.


#### СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате продукта – консултирайте се с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.


#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на продукта е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставяте продукта върху бельото.

#### СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

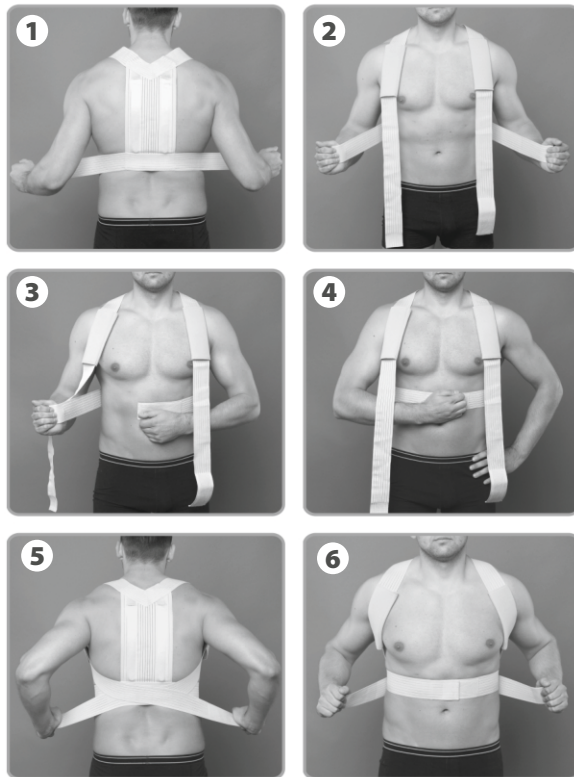

#### СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

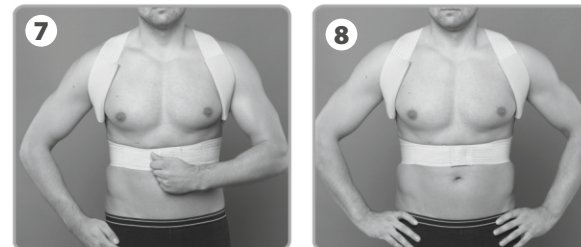

Избирайте размера по обиколката на талията, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на талията, см	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120



При измерване на обиколката на талията сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.