

Следоперационен колан за кръст

ARC420

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Продуктът е изработен от висококачествен материал, който съдържа 40% памук, което го прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За профилактика срещу образуване на постоперативни хернии.
- Използва се за прибиране на корема и подобряване на силуета за естетични цели.
- Използва се през периода на възстановяване след раждане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Предната част на колана е плътна и неразтеглива, осигурява надеждна фиксация и поддръжка на предната коремна стена. Спомага за заздравяването на следоперативни шевове.
- Велкро лентата осигурява надеждна фиксация и прави колана удобен за ползване.
- Коланът е направен от устойчив материал с висока въздухопропускливост, който позволява използването на продукта през всеки сезон. Еластичността спомага за допълнителна фиксация и поддръжка.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Вграденият джоб за пристягане помага за поставянето на продукта без усилия и допълнителна помощ.
- Съдържанието на естествен памук прави продукта въздухо-пропусклив, осигурява нежно прилягане към кожата и издръжливост при носене.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Поставете продукта върху бельото. Поемете дълбоко въздух, приберете корема и го закрепете върху коремната област с велкро лентата. Коригирайте напасването на продукта спрямо особеностите на фигурата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

От 2 до 12 часа дневно, в зависимост от състоянието и препоръките на лекаря. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекаря. Необходимостта от продължително носене, от предписания курс на лечение, трябва да се съгласува с лекаря. Не спирайте използването на продукта без консултация с лекар.


СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате колана се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на колана. Не се допуска използване на повреден колан.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на продукта е противопоказна при локални заболявания на кожата и бременност. При хиперчувствителност към някой от материалите, задължително поставяйте продукта върху бельото. Не поставяйте продукта при използване на загряващи гелове в областта на кръста.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

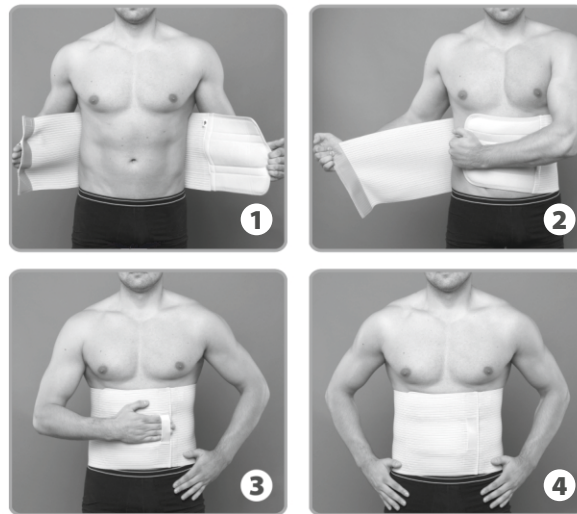

Избирайте размера по обиколката на талията, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на талия, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



При измерване на обиколката на талията сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: памук 40%, найлон 30%, поливискон 15%, еластан 15%, велкро лента.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey