



Ортопедичен пояс за кръст

ARC9202

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ортопедичният пояс е изработен от висококачествен материал, което го прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Намалява болките с различен произход в поясно-кръстната област на гръбначния стълб.
- За рехабилитация след травми и операции в поясно-кръстната област.
- За профилактика на травми и заболявания на поясно-кръстната област при физически натоварвания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Анатомичният дизайн на продукта спомага за по-добро прилягане към тялото и създава комфорт при носене.
- Специалното плетка по края на пояса не позволява деформирането на ръбовете и предотвратява притискането на меките тъкани.
- Вграденият джоб за пристягане помага за поставянето на продукта без усилия и допълнителна помощ.
- Търдите банели помагат за пълното прилягане на продукта към тялото, като по този начин увеличава ефективността от фиксиращото действие на пояса.
- Поясът е изработен от специален материал, създаден по уникална технология на триизмерна плетка. Оптимално следва контура на тялото и спомага за допълнителното компресионнодействие на пояса.
- Материалът, от който е изработен поясът, е влаго и въздухопропускливи.

www.prolife-ortho.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРИЛОЖЕНИЕ

В легнalo положение, върху твърда или полу-твърда повърхност, поставете пояса върху бельото. Широката му част трябва да бъде отзад на кръста. Поемете дълбоко въздух, приберете корема и го закрепете върху коремната област с велкро лентата. Коригирайте напасването на пояса спрямо особеностите на фигурата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

От 2 до 12 часа дневно, в зависимост от състоянието и препоръките на лекар. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекар. Необходимостта от по-продължително носене и предписания курс на лечение, трябва да се съгласува с лекар. Не спирайте използването без консултация с лекар.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате ортопедичния пояс се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на пояса. Не се допуска използване на повреден пояс.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на ортопедичния пояс е противопоказана при локални заболявания на кожата и бременност. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставите пояса върху бельото. Не поставяйте при използване на загряващи гелове в областта на кръста.


Избирайте размера по обхвата на талията,
съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколката на талията, см	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120



При измерване на обхвата на талията сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

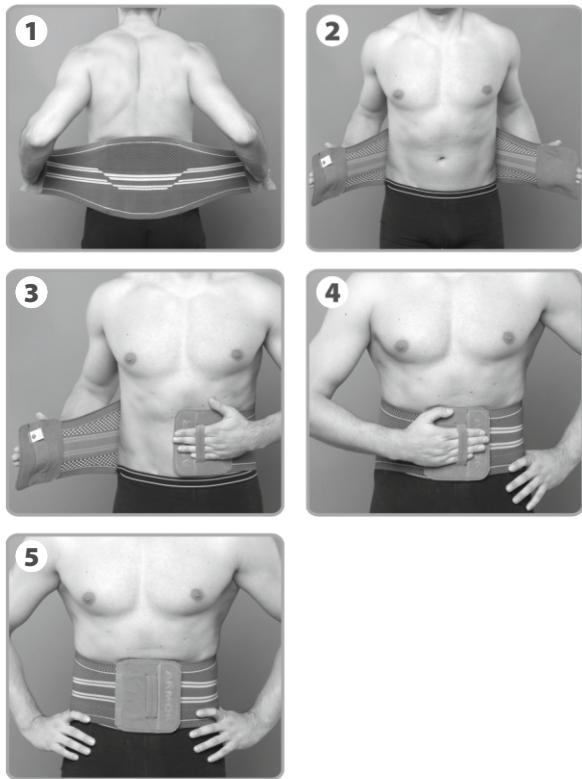

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки пояса. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не избелвате (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Ортопедичният пояс не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиамид 55%, еластан 45%, велкро лента, 4 метални банела.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey