

Загриващ пояс

ARYK01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Поясът е изработен от висококачествен материал, което го прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Загриващо действие за обезболяващ и противовъзпалителен ефект.
- За лечение на миозити в поясната област.
- За профилактика на радикулит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Анатомичният дизайн на продукта спомага за по-доброто му прилягане към тялото и дава по-голям комфорт при носене.
- Велкро лентата осигурява надеждна фиксация и прави пояса удобен за ползване.
- Загриващият пояс е изработен от съвременния материал АКРИЛНА ВЪЛНА, който има забележителен загриващ ефект.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставете пояса върху бельото. Поемете дълбоко въздух, приберете корема и го закрепете върху коремната област с велкро лентата. Коригирайте напасването на пояса спрямо особенностите на фигурата.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекаря. Необходимостта от по-продължително носене и предписаният курс на лечение, трябва да се съгласуват с лекар. Не спирайте използването на загреващия пояс без консултация с лекар.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате пояса се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на пояса. Не се допуска използване на повреден пояс.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на загреващия пояс е противопоказна при локални заболявания на кожата и бременност. При хиперчувствителност към някоя от материалите задължително трябва да поставяте пояса върху бельото. Не поставяйте при използване на загреващи гелове в областта на кръста.


Избирайте размера по обиколката на талията, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Обиколка на талията, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



При измерване на обиколката на талията сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

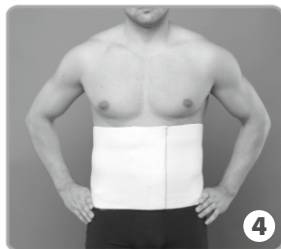

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: акрилна вълна 60%, полиестер 20%, еластан 20%, велкро лента.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey