

**МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ/ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ:**

Пластири с FIR технология, която отразява далечните инфрачервени лъчи, излъчвани от клетките на тялото. Пластирите са изработени от 100% нетъкан полипропиленов текстил, съдържащ биоминерали (като титан).
 Научни изследвания, базирани на спектроскопски методи са установили, че специална прахообразна смес от минерали (метални оксиди), наречена AT5.05, е в състояние да отразява най-отдалечената част (между 4-21 микрона) от инфрачервената светлина, наречена далечни инфрачервени лъчи (FIR).
 Последните научни изследвания установяват, че тази технология може да бъде приложена към различни части на тялото, използвайки отразените инфрачервени лъчи, обикновено излъчвани от разсейването на телесната топлина, което води до подобряване на микроциркулацията на повърхността на кожата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Пластирите са подходящи:

- За облекчаване на мускулно-скелетни болки, причинени от прекомерното натрупване на тъканна ацидоза от претоварване на мускулните влакна, премахвайки по-бързо млечната киселина от тялото.
- При функционални възстановителни процеси на мускулните тъкани, засегнати от контракции поради претоварване, анталгична контрактура и липса на мускулна сила в резултат на синдроми на претоварване, тъй като пластирите осигуряват облекчение на болезнените симптоми и имат миорелаксиращо действие върху въпросната мускулна област.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:**ПЛАСТИР ЗА ГЛЕЗЕН**

Използва се при болки в глезена и контрактури (навяхвания, тендинити).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира върху глезена, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР ЗА ВРАТ**

Използва се при проблеми със ставите на гръбначния стълб (болки във врата).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира в областта на врата, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР ЗА КОЛЯНО**

Използва се при проблеми с коленните стави.

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Сгънете крака в коляното и поставете големия пластир отпред. Разгънете коляното си и поставете малкия пластир отзад.
3. Преди да поставите пластира, уверете се, че кожата Ви е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР ЗА ЛАКЪТ**

Използва се при болки в лакътя и контрактури (тендинит, контузии).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира върху сгънатия лакът, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР ЗА ГРЪБ**

Използва се при проблеми със ставите на гръбначния стълб (болки в гърба).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира върху долната част на гърба, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

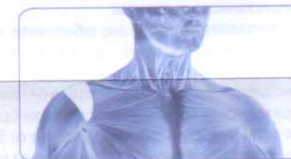
Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР ЗА РАМО**

Използва се при болки в рамото и контрактури (артрит, артроза).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира върху рамото, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирът ще продължи да действа дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПЛАСТИР FIT LADY**

Използва се за облекчаване на менструални болки.

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете двата кръгли пластира в областта на яйчниците, а пластира с неправилна форма поставете в долната част на гърба, на нивото на L3 прешлена.
3. Преди да поставите пластирите, уверете се, че кожата Ви е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на описаните места в продължение на 5 дни.
5. Ако е необходимо, повторете по същия начин следващия месец.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР**

Използва се при болки в гърба, болки във врата, болки в областта на седалищния нерв, при мускулно напрежение (в рамо, лакът, коляно, прасец и др.).

1. Отстранете пластира от основата.
2. Поставете пластира(ите) върху мястото, където се усеща болка, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирът е прилепнал напълно към кожата.
4. Оставете пластира на мястото на болката в продължение на 5 дни.

УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА ВРАТ**Използва се за проблеми със ставите на гръбначния стълб (болки във врата).**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите в областта на врата, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА ЛАКЪТ****Използва се при болки в лакътя и контрактури (тендинит, контузии).**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите върху сгънатия лакът, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ГЪРБА****Използва се при проблеми със ставите на гръбначния стълб (болки в гърба).**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите върху долната част на гърба, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА КОЛЯНО****Използва се при проблеми с коленните стави.**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите върху сгънатото коляно, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА РАМО****Използва се при болки в рамото и контрактури (артрит, артроза).**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите върху рамото, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**УНИВЕРСАЛЕН ПЛАСТИР ЗА ГЛЕЗЕН****Използва се при болки в глезена и контрактури (навяхвания, тендинити).**

1. Отстранете пластирите от основата.
2. Поставете пластирите върху глезена, като преди това се уверите, че кожата е чиста, суха и обезкосмена.
3. Изчакайте приблизително две минути, преди да се движите, за да сте сигурни, че пластирите са прилепнали напълно към кожата.
4. Оставете пластирите на мястото на болката в продължение на 5 дни.
5. Продължете да прилагате до изчезване на симптомите.

Пластирите ще продължат да действат дори и след намокряне (например по време на къпане).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

Продуктите не са стерилни и не съдържат никакви лекарствени съставки.

Пластирите не трябва да се прилагат върху рани или върху наранена или зачервена кожа, тъй като е възможно да причинят инфекция.

Ако страдате от специфични нарушения или болестни състояния, свързани с кръвообращението (особено свързани с микроциркулацията) или мускулни проблеми, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате продукта, тъй като тези състояния могат да направят терапията неефективна и/или да доведат до влошаване на патологичното състояние.

Не поставяйте пластир, ако забележите, че целостта му е нарушена или има очевиден дефект.

На мястото на поставяне на пластира могат да се появят реакции на свръхчувствителност, които могат да се проявят с поява на сърбеж, зачервяване или истинска еритема, понякога с поява на кожни мехури.

Ако след поставянето на пластира се появи сърбеж или парене, незабавно отстранете пластира.

При употреба на продукта от дете или бременна жена, моля консултирайте се с Вашия лекар, преди използването му, за да се избегнат възможни нежелани реакции.

Не оставяйте един пластир за повече от 5 дни. Ако са минали повече от 5 дни, сменете пластира с нов, за да избегнете евентуално зачервяване на кожата.

Не използвайте продукта след срока на годност, тъй като той може да е загубил основните си характеристики.

Ефективността на пластира не е гарантирана в случай, че се използва повторно.

Ако възникне сериозен инцидент, потребителят трябва да съобщи за сериозния инцидент директно на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте при температура между +5°C и +30°C. Опаковката ще осигури необходимата защита, за да се предотврати повреждането на продукта.

Не изхвърляйте в околната среда. Изхвърляйте използваните пластири в съответствие с местните изисквания. За по-подробна информация, попитайте местната служба за управление на отпадъците.

Продуктът не е термичен пластир и не се самозагрява за постигане на желания ефект. Въпреки това, поради ефекта върху локалната микроциркулация, в някои случаи може да се усети леко затопляне в областта на приложение.

Дата на редакция на текста Октомври, 2020

СИМВОЛИ

Направете справка с инструкциите за употреба



Температурни граници



Да се пазят от слънчева светлина



Годен за употреба до



Да се пазят сухо



Медицинско изделие



Да не се използва повторно



Да не се използва, ако опаковката е повредена



Партиден номер



Каталожен номер



Производител



Производител
D.FENSTEC Srl
Viale Verona 74, 36077
Altavilla Vicentina, Vicenza
(Италия)
Tel. +39 0444 17 50 103

