

**Artelac Ectoin®**  
**Артелак Ектоин®**

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба – те съдържат важна информация как да използвате този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, попитайте Вашия фармацевт, Вашия лекар или се свържете с нас.

0,24% хиалуронова киселина (като натриев хиалуронат), 2% Ectoin®, натриев хлорид, натриев хидроксид (за корекция на рН) и вода за инжекции.

**Предназначение:** Подкрепящо лечение и превенция на алергични симптоми на конюнктивит, облекчение на раздразнени очи и лубрикант за очи

---

**Какво представлява Артелак Ектоин®?**

**Артелак Ектоин®** е медицинско изделие, което съдържа Ectoin®, естествена, защитаваща клетките молекула със свойства да намалява възпалението и да стабилизира мембраната и хиалуронова киселина, естествена молекула, успокояваща окото, чрез способността си да се свързва с водата във висока степен и стабилизиращите си свойства.

Усъвършенстваната формула притежава много висока поносимост, тъй като тя не съдържа консерванти и буфери.

**Какво е предназначението на Артелак Ектоин®?**

**Артелак Ектоин®** представлява капки за очи, изотоничен разтвор, който може да се използва за лечение и превенция на симптоми на сезонен и целогодишен алергичен конюнктивит, причинен например от полени, прахови акари, животинска козина или плесен. Ефективно намалява сърбежа, дразненето, зачервяването или сълзенето на очите; навлажняването им води до облекчение.

Въз основа на наличните данни, продуктът може да се използва при деца, бременни и кърмещи жени.

**Кога трябва да използвате Артелак Ектоин®?**

**Артелак Ектоин®** стабилизира естественото слъзно покритие по два начина: хиалуроновата киселина оказва положително въздействие върху водната фаза и

Естоин® подсилва липидната фаза. Този двоен начин на действие защитава окото от вредните въздействия на алергени и други външни фактори и подкрепя процеса на регенерация на раздразнената и чувствителна конюнктива. **Артелак Ектоин®** не съдържа консерванти и е подходящ за лица, които носят контактни лещи, и за чувствителни очи.


### **Колко често и колко време трябва да използвате Артелак Ектоин®?**

Приложете 1-2 капки **Артелак Ектоин®** в окото при необходимост. Може да го използвате всеки ден и толкова често, колкото искате. Няма ограничение на продължителността на употреба.


### **Как да използвате Артелак Ектоин®?**

Патентованият помпен механизъм на Артелак Ектоин® позволява разтвора капки за очи да не съдържа консерванти, но бутилката с капкомер може да не изглежда като тези, които сте използвали в миналото.


Илюстрациите показват простата и лесна употреба на Артелак Ектоин®

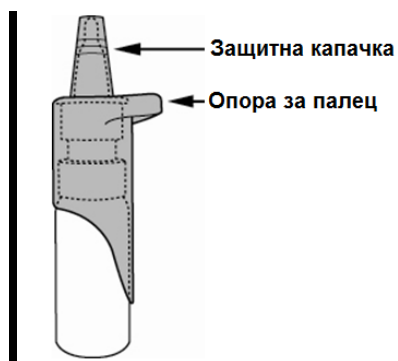


1. Сваляйте защитната капачка от върха на бутилката преди всяка употреба. Уверете се, че върхът на бутилката не докосва пръстите.

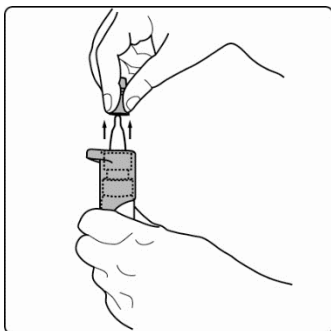

2. Поставете палеца върху ергономичната опора за палец и два други пръста на дъното на бутилката.

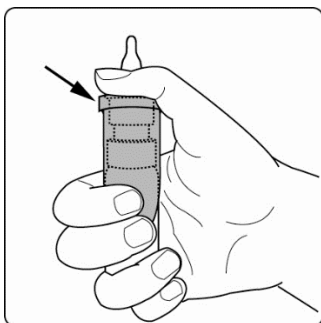


3. Обърнете бутилката надолу и я дръжте, както е показано. Преди да използвате помпата за пръв път, трябва да я подготвите. Можете да направите това, като натиснете надолу опората за палеца около 7 пъти до поява на първата капка.

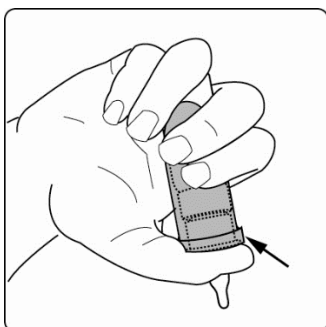

4. За да приложите капката, наклонете глава леко назад и дръжте бутилката, в удобна за вас позиция над очите. Внимателно дръпнете долния клепач на окото надолу с пръста на свободната ръка, дръжте бутилката във вертикална позиция и внимателно натиснете опората на палеца, за да приложите една капка в окото.

След това затворете окото и бавно го завъртете, за да разнесете капката оптимално по повърхността на окото.

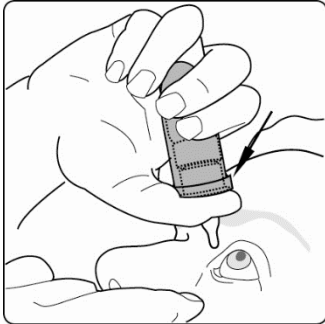

Можете да използвате другата ръка за допълнителна опора и точност, ако смятате, че е необходимо.

5. Избягвайте контакт на върха на бутилката с очите или пръстите, за да предотвратите възможно замърсяване на разтвора.
6. Връщайте защитната капачка върху върха на бутилката незабавно след всяка употреба.

### **Кога не трябва да използвате Артелак Ектоин®?**

Не използвайте този продукт, ако сте свръхчувствителни към някоя от съставките.

### **Важна информация относно употребата на Артелак Ектоин®**

- Моля, имайте предвид, че при първа употреба или след като не е използван за известно време, е необходимо първоначално изпомпване на разтвора. При изпомпване на разтвора, бутилката трябва да се държи с върха на капкомера надолу.
- Локални реакции на свръхчувствителност се съобщават рядко. В такива случаи лечението трябва да бъде прекратено.
- Продуктът може да причини временно замъгляване на зрението след приложение, което може да повлияе отрицателно на способността за шофиране или работа с машини.

- Не докосвайте повърхността на окото с връхчето на бутилката, за да предотвратите възможно нараняване на очната повърхност или замърсяване на разтвора.
- След приложение изтръскайте възможните оставащи капки.
- Невнимателната употреба на продукта в разрез с инструкциите за употреба може да доведе до изплъзване на продукта от ръката и да причини нараняване на окото
- Изчакайте приблизително 15 минути, преди да използвате друг продукт за очи.
- Не използвайте след срока на годност.
- Не използвайте, ако опаковката или бутилката е повредена.
- **Артелак Ектоин®** е в бутилка с малки пластмасови части, които могат да бъдат погълнати от малки деца. Опасност от задушаване. Поради това **Артелак Ектоин®** трябва да се пази на място, недостъпно за деца.
- **Артелак Ектоин®** е подходящ за употреба с меки и твърди контактни лещи

### **Как да съхранявате Артелак Ектоин®?**

Да се съхранява при температура между 2 – 25°C.

Дизайнът на бутилката Ви позволява да използвате **Артелак Ектоин®** в продължение на **6 месеца** след отваряне.

### **Видове опаковки:**

**Артелак Ектоин®** се предлага в опаковка от 10 ml капки за очи.