

Clearblue® PLUS

с ПРОМЕНЯЩ ЦВЕТА СИ ВРЪХ

Тест за бременност

• Clearblue® PLUS е с над 99% точност от деня на очакваната менструация.

• Clearblue® PLUS може да се използва 5 дни преди закъснението на менструацията.

Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите тест.

Преди да започнете

Може да е полезно до вас да има часовник, когато правите теста.

1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТА

Ако се тествате от деня на очакваната менструация, можете да го направите по всяко време на деня.

Ако се тествате преди деня на очакваната менструация, използвайте първата си сутрешна урина. Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от фолиевата опаковка и отстранете синята капачка. Използвайте тестовия стик веднага.

ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА УРИНА

Можете да тествате директно под струя урина или да потопите в проба урина, събрана в чист и сух съд.

- Дръжте променящия цвят си връх надолу или под

Вижте въпрос 7, ако променящият цвят си връх не е порозовял напълно.



струя урина, или в събрана проба урина, както е показано, само за 5 секунди.

- Променящият цвят си връх бързо ще се оцвети в розово, което означава, че се абсорбира урина. Продължете да задържате променящия цвят си връх в урината за не по-малко от 5 секунди.



Продължете да задържате променящия цвят си връх в урината за не по-малко от 5 секунди.

Започнете да отбръсвате 5 секунди веднага щом видите, че променящият цвят си връх стане розов.

Струя урина ИЛИ Взеги проби

- Дръжте променящия цвят си връх ориентиран надолу или поставете стика върху равна повърхност, докато настъпи моментът да прочетете резултата и се появи синя линия на контролния дисплей.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ.

2 3 МИНУТИ

ИЗЧАКАЙТЕ 3 МИНУТИ.

Когато тестват започне да работи, ще видите как започва(т) да се появява(т) синя(и) линия(и).


3 ОТЧИТАНЕ НА ВАШИЯ РЕЗУЛТАТ

Вече можете да отчетете резултата си на дисплея с резултат.

На контролния дисплей трябва да има синя линия, когато отчитате резултата си. Тази линия показва, че тестът е проработил.

Резултат „Бременна сте“ може да се появи след 1 минута, когато се тествате от деня на закъснение на менструацията (който е денят след деня на очаквана менструация, която не е дошла). Трябва да изчакате 3 цели минути, за да се потвърди резултат „Не сте бременна“ или когато се тествате, преди да има закъснение на менструацията ви (вижте въпрос 10).

Ако на контролния дисплей не се появи синя линия в рамките на 10 минути, това означава, че тестът не работи (вижте въпрос 7).

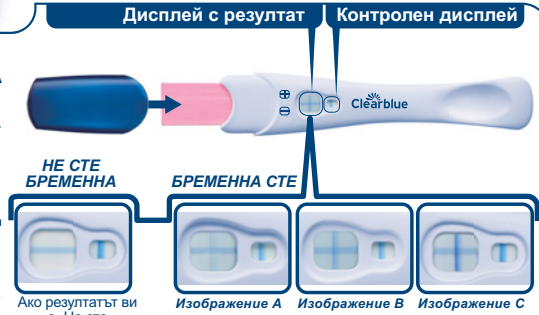

Ако резултатът ви е „Не сте бременна“, вижте въпрос 12 в раздела „Въпроси и отговори“.

Изображение А Изображение В Изображение С

Ако резултатът ви е „Бременна сте“, вижте въпрос 13 в раздела „Въпроси и отговори“.

Няма значение дали едната от линиите, образувачи символа „+“, е по-светла или по-тъмна от другата – резултатът е „Бременна сте“.

ВАЖНО!

Отчетете резултата в рамките на 10 минути след извършването на теста.

Не вземайте под внимание промените в резултата след този период.

Ако все още не сте сигурна в резултата, вижте въпрос 8 за пълна информация.

Въпроси и отговори – Прочетете раздела по-долу, в който ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Въпроси и отговори

1 Колко точен е тестът Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS е с над 99% точност при лабораторни тестове, когато се използва от деня на очакваната менструация.

2 Как работи тестът Clearblue® PLUS?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хорон гонадотропин). Количеството на hCG в тялото се повишава по време на ранна бременност. Clearblue® PLUS може да разпознае малки количества от този хормон в урината ви (чувствителността на този тест е 25 mIU/ml).

Ранно тестване

Брой дни преди очакваната менструация	% проби от бременни жени с резултат „Бременна сте“
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

3 Кога мога да се тествам с Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS може да се използва до 5 дни преди закъснението на менструацията (което е 4 дни преди очакваната менструация). Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. Вижте таблицата по-долу за резултати от клинични изпитвания на Clearblue® PLUS с проби на ранна бременност.

4 Трябва ли да използвам първа сутрешна урина?

Ако се тествате преди очакваната менструация, препоръчваме ви да тествате първа сутрешна урина за забременяване, като климиден цитрат, поставят с по всяко време на деня. Избягвайте приемането на големи количества течности преди тестването.

5 Не съм сигурна кога да очаквам следващата си менструация. Как да разбера, че се тествам в точното време?

За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като преброите дните от първия ден на менструацията до деня преди началото на следващата менструация.

- Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.
- Ако имате представа кога да очаквате менструацията си, препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след последния път, когато сте имали сексуален контакт без предпазни средства.
- Ако резултатът е „Не сте бременна“, но все още подозирате бременност, вижте въпрос 13.

6 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?

- Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
- Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, могат да дадат подвеждащи резултати (главна причина за забременяване, като климиден цитрат, поставят с инекция и тестването трябва скоро след приема им може да покаже фалшив резултат „Бременна сте“).
- Друг тип терапии за забременяване (например климиден цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви (напр. контрацептивни таблетки) не би трябвало да повлияят на резултата.
- Ако наскоро сте сгрепи да приемате хормонални контрацептиви или се подлагате на терапия за забременяване, като климиден цитрат, поставят с може да е нередовен, което да доведе до тестване върху скоро.
- Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сте“.

- Ектопична бременност, овариални кисти, менопауза и някои много редки медицински състояния могат да доведат до неверни резултати.
- Ако получите резултат „Бременна сте“, е възможно по-късно да откриете, че вече не сте бременна поради естествено прекратяване на бременността, което може да се случи в ранните стадии.
- Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с вашия лекар.

7 Използвах теста, но променящият цвят си връх не порозовя напълно. Какво да правя?

Ако променящият цвят си връх не е порозовял напълно, може да не сте използвали достатъчно урина. Ако синята линия на контролния дисплей се появи в рамките на 10 минути след извършването на теста, това означава, че тестът работи. Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 10 минути след извършването на теста, вижте въпрос 8.

8 Използвах теста, но не се появи синя линия на контролния дисплей. Какво да правя?

Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 10 минути след извършването на теста, това означава, че тестът не работи. Възможни причини:

- Променящият цвят си връх не е бил насочен надолу или тестовият стик не е бил поставен върху равна повърхност, след като е бил в контакт с урината.
- Използване в твърде голямо или твърде малко количество урина. Необходимо е да подложите на проба урина за 5 секунди.

9 Какво да правя, ако не съм сигурна в резултата?

• За да бъде резултатът ви „Бременна сте“, трябва да се появи синя линия на контролния дисплей и символ „+“ на дисплея с резултат в рамките на 10 минути след извършването на теста.

Външният вид на символа „+“ на дисплея с резултат може да се различава, но линиите, които образуват символа „+“, и линията на контролния дисплей трябва да имат еднаква ширина (вижте изображение А–С).

Изображение А

Това обозначава резултат „Бременна сте“. Това е по-вероятно, когато се тествате преди деня на очакваната менструация, когато нивата на hCG може да са относително ниски.

Изображение В

Не е необичайно, когато сте бременна и се тествате в или около деня на очакваната менструация, тъй като нивата на hCG може все още да са относително ниски.

Изображение С

IVD	Медицинско изделие за инвитро диагностика	LOT	Партиден номер	⊗	Не използвайте повторно
TEMP	Температурно ограничение 2°C–30°C	⌚	Да се използва до дата:	🏭	Производител
				📄	Направете справка с инструкциите за употреба

За следващи стъпки, информация и съвети, свързани с въпроси на бременността посетете нашия уебсайт:

www.clearblue.com

Това изделие е за домашна употреба.

Да се съхранява на стайна температура.

Оставете при стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се съхранява в хладилник.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Само за инвитро диагностика.

Да не изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Да не се използва, ако фолиевата опаковка е повредена.

Да не се използва тестване стик с изтекъл срок на годност.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария. Clearblue е търговска марка на SPD. Произведено в Китай © 2019 SPD. Всички права запазени

Дистрибутор: OVLÁŠTENÍ ZASTUPNÍK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия.