

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на стоката: .....

Модел: .....

Фабричен номер: .....

Купувач: .....

Адрес: .....

Телефон: .....

Стоката е закупена на дата: .....

Продавач печат: .....

Подпис: .....

*Гаранцията на апарата за измерване на кръвно налягане е 1 година от датата на закупуване. Гаранцията не е валидна за консумативите (маншет, помпа, стетоскоп) и детайлите извън манометъра. Гаранцията не е валидна за повреди, възникнали в резултат на неправилно/небрежно отношение, неспазване на инструкциите за употреба или опити за поправка от неоторизирани лица. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени на хора, имущество или домашни любимци, пряко или косвено, в резултат на неспазване на инструкциите за употреба на апарата. Гаранцията е действителна само в случай, че в сервизния център бъде представена правилно попълнена гаранционна карта с печат на търговската организация и касов бон.*



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕХАНИЧЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ



## **Прочетете внимателно това упътване преди използване на продукта**

А. Този продукт е в съответствие с директива EN1060 за неинвазивен апарат за измерване на кръвно налягане.

Б. Процедури за употреба.

### **1. Позиция на маншета.**

Направете последващата процедура няколко пъти докато се уверите че сте сигурни в нея и познавате добре частите на апарата.

Преди да започнете измерването се уверете че сте спокоен или не сте се натоварвали в предишните 10-15 минути. Това ще намали грешки породени от физическа активност. Ако работите с дясна ръка сложете маншета на лявата си ръка като той не трябва да е много стегнат, нито отпус-

нат – на ниво около 2-3 см от лакътната става. Стегнете маншета така че главата на стетоскопът да бъде върху артерията точно над лакътят. Дали сте седнали или легнали уверете се че ръката ви е на нивото на сърцето!

### **2. Напомпване на маншета.**

Почувствайте пулсът на артерията с пръст за да се уверите че стетоскопът е на правилно място. Сложете си стетоскопът като държите с дясната си ръка помпата на която е свързан манометъра. Уверете се че манометърът и помпата са затворени и не изпускат въздух – завъртете по часовниковата стрелка! Напомпайте с последователни равномерни движения. Помпайте докато чувате пулсът си и след това още 30 мм.

### **3. Бавно изпуснете въздуха от маншета.**

Бавно развийте обратно на часовниковата стрелка като гледате да пада с 2-4 mm/Hg на секунда.

Темпото на отпускане на маншета е важно за правилното отчитане на стойностите!

Помнете че прекаленото стягане на маншета ще спре кръвотока в ръката, затова не оставайте в позиция на напомнимано състояние прекалено дълго!

### **4. Резултати.**

След отпускане на въздуха слушайте внимателно първият звук (удар) на пулсът ви докато гледате манометъра – това е вашето систолично налягане (горна граница). Продължете отпускането със същият ритъм 2-4 мм/секунда, гледайте внимателно манометъра и когато чуete послед-


ният звук (удар) това е вашето диастолично налягане.

С подходящите грижи за вашия апарат за измерване на кръвно налягане той ще ви служи дълги години, ако следвате инструкциите за употреба. Манометърът не трябва да се изпуска или хвърля? Стрелката трябва да показва 0 когато маншетът не е напомниман!



*Manufacturer:*

**Wuxi Medical Instrument Factory**  
Address: No. 86 Dongjie, Zhangjing,  
Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu  
214194 P.R. China.

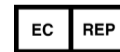

**MEDEYA PHARMAKO,**  
**SOFIA, BULGARIA,**  
[www.aptekamedea.bg](http://www.aptekamedea.bg)