

Поддържащ бандаж за ръка

ARM304

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Бандажът е изработен от висококачествен материал, което го прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- При гипсова имобилизация на ръката и предмишницата.
- При увреждане на връзките на раменната става.
- За рехабилитация след фрактура на раменната, лакетната и лъчевата кост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Презрамката и коланът, който обхваща талията, надеждно фиксират ръката.
- Меката подложка на презрамката разпределя равномерно натоварването и не протрива кожата.
- Бандажът е направен от устойчив материал с висока въздухопропускливост, който осигурява температурен комфорт. Позволява използването на продукта през всеки сезон.
- Специалната лента за палеца подкрепя китката и намалява мускулните болки.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поддържащият бандаж се поставя на ръката, след което горната презрамка се прехвърля през шията отпред и се закрепя с помощта на закопчалката. Долният колан се прехвърля зад кроста и се закопчава отпред, на външната страна на бандажа (но не близо към корема). Трябва да коригирате колана и презрамката за правилното и удобно положение на ръката. Меката подложка се поставя върху рамото, за да се намали натиска на презрамката. Продуктът е подходящ за дясна и лява ръка.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Преди да започнете да използвате продукта се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на бандажа. Не се допуска използване на повреден поддържащ бандаж.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на бандажа е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някои от материалите задължително трябва да поставяте бандажа върху бельото.

Избирайте размера по дължината на предмишницата (от върха на лакътя до кутрето) **съгласно таблицата:**



Област на измерване	Размери				
	S	M	L	XL	XXL
Дължина на предмишницата см	24 – 28	28 – 32	32 – 36	36 – 42	42 – 48

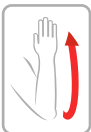




При измерване на дължината на предмишницата, сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ

ЛЯВА РЪКА

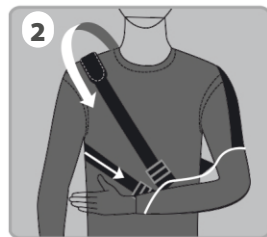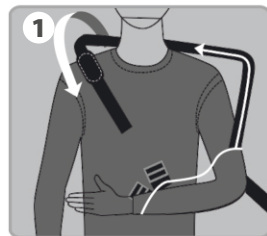

ДЯСНА РЪКА

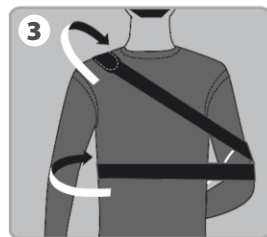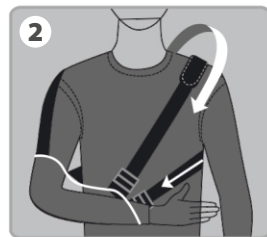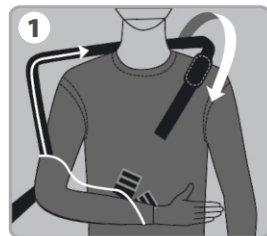

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с шадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиестер 100%, велкро лента, пластмасова закопчалка.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey