

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: памук 40%, найлон 30%, поливискон 15%, еластан 15%, велкро лента.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.


Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.



ISO 9001
ISO 13485

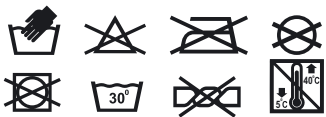

Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland



Наглезенка

ARA2406

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Наглезенката е изработена от висококачествен материал, който съдържа 40% памук, което прави продукта максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За леки увреждания на капсуло-лигаментарния апарат на глезенната става.
- За профилактика на травми на глезенната става при спортни дейности и интензивни физически натоварвания.
- За рехабилитация след травми и операции на глезенната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Дизайнът на наглезенката позволява лесно отваряне и затваряне, което я прави удобна за поставяне.
- Анатомичната ѝ форма и откритата пета дават по-голямо удобство при ежедневно използване.
- Велкро лентата осигурява надеждна фиксация и прави наглезенката удобна и стабилна при носене.

- Подходяща за ляв и десен крак.
- Съдържанието на естествен памук прави продукта въздухопропусклив. Осигурява нежно прилягане към кожата и издръжливост при носене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Точният размер на наглезенката се определя по обиколката на глезенната става на нивото на кокалчето. Индивидуалните режими и срокове за носене се определят от лекаря.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате наглезенката се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на наглезенката. Не се допуска използване на повредена наглезенка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на наглезенката е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставяте наглезенката върху чорап. Не поставяйте наглезенката при използване на загряващи гелове в областта на глезенната става.

Избирайте размера по обиколката на глезенната става на нивото на кокалчето, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери	
	1	2
Обиколка на глезенната става на нивото на кокалчето, см	20 – 27	28 – 35



При измерване на обиколката на глезенната става, сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ



НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ

