



Ортеза за коляното с отвор за пателата

ARK2101B

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ортезата е изработена от висококачествен материал, което я прави максимално безопасна и комфортна. Високото му качество е потвърдено от международните и европейски сертификати за съответствие със стандартите за качество ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- При болки в коленната става, причинени от артрит, синовит и бурсит.
- За профилактика на травми на коленната става при спортни занимания и физически труд.
- За рехабилитация след травми и операции на коленната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Наколенката е подсилена със силиконов пръстен, който допълнително стабилизира пателата (капачката на коляното), предпазва я и намалява болката.
- Еластичната вложка в задната част на ортезата не оказва силен натиск върху подколennата ямка и предотвратява протриването при носене.
- Регулиращата лепенка позволява по-точно прилягане на изделието по формата на бедрото (в размери XXL и XXXL има допълнителна регулираща лепенка в областта на коляното).

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Анатомичният дизайн на продукта спомага за по-доброто му прилягане към тялото и дава по-голям комфорт при носене.
- Ортезата е изработена от AEROTEX — трислоен материал със смесен състав. AEROTEX е въздухо-пропусклив и еластичен. Има загреващо и микромасажиращо действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставете ортезата като я обуете от към по-широката и страна. Прикрепете плътно с помощта на регулиращата лепенка. Подходяща е и за десен, и за ляв крак.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате продукта се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на продукта е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставяте продукта върху клин. Не поставяйте продукта при използване на загреващи гелове в областта на коленната става.

Избирайте размера по обиколката на коляното, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обиколката на коляното см	34 – 36	36 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50



При измерване на обиколката на коляното сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ



ГРИЖА НА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиестер 40%, дунапрен 60%, силиконов пръстен, велкро лента.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.

CE ISO 9001
ISO 13485



Произведено в: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey