



Ортеза за коляното с отвор за пателата

ARK2102B

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Продуктът е изработен от висококачествен материал, който го прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество е потвърдено с международни и европейски сертификати за съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- При болки в коленната става, причинени от артрит, синовит и бурсит.
- За лечение на травми, частични увреждания на коленните връзки на коленната става.
- За рехабилитация след травми и операции на коленната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Ортезата е подсилена със силиконов пръстен, който допълнително стабилизира пателата (капачката на коляното), предпазва я и намалява болката.
- Гъвкавите банели дават допълнителна опора и намаляват напрежението върху ставата при движение. Също не позволяват усукване на ортезата при носене.
- Регулиращата лепенка позволява по-точно прилягане на ортезата по формата на бедрото (в размери XXL и XXXL има допълнителна регулираща лепенка в областта на коляното).

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Еластичната вложка в задната част на ортезата не оказва силен натиск върху подколennата ямка и предотвратява протриването при носене.
- Ортезата е изработена от AEROTEX — трислоен материал със смесен състав. AEROTEX е въздухо-пропусклив и еластичен. Има загреващо и микромасажиращо действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставете ортезата като я обуете от по-широката и страна. Прикрепете плътно с помощта на регулиращата лепенка. Подходяща за десен и за ляв крак.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да започнете да използвате ортезата се консултирайте с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на ортезата е противопоказна при локални заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от материалите задължително трябва да поставяте ортезата върху клин. Не поставяйте при използване на загреващи гелове в областта на коленната става.

Избирайте размера по обиколката на коляното, съгласно таблицата:

Област на измерване	Размери					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обиколка на коляното, см	34-36	36-38	38-41	41-44	44-47	47-50



При измерване на обиколката на коляното сантиметровата лента трябва да прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ



ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Перете на ръка с щадящи перилни препарати при температура 30°C. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на топлина. Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на химическо почистване. Да не се излага на високи температури (над 120°C).

Състав: полиестер 40%, дунапрен 60%, силиконов пръстен, велкро лента, 4 гъвкави метални банела.

Съхранение: да се съхранява на сухо място при температура от +5°C до +40°C, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина и прах.

Срок на годност: 5 години от датата на производството при спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.



Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey