



## Кратки инструкции за употреба на Beurer RH 112




1. Проверете за съзнание и дишане

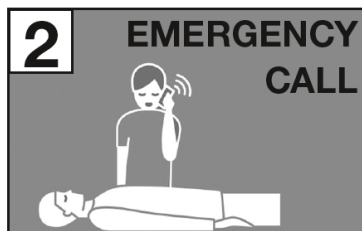


2. Обадете се на местната служба за спешна помощ

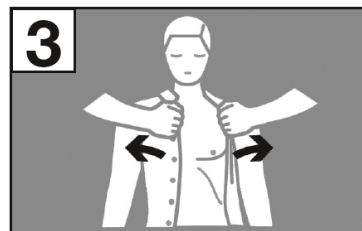


3. Разкрийте/Съблечете горната част на тялото

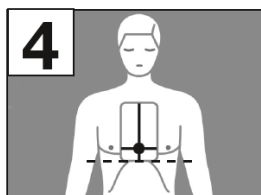

4. Поставете LifePad®

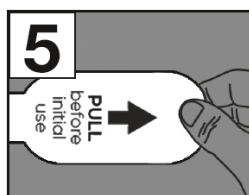


5. Дръпнете изолационната лента на батерията

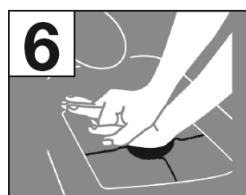

6. Поставете ръцете си върху пациента




7. Звуков Сигнал =Натискане/Компресия

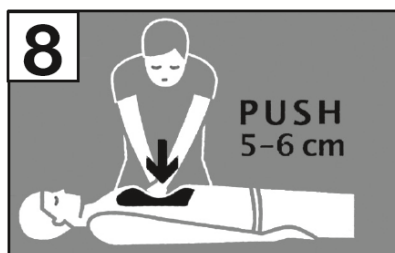

8. Светлинните LED индикатори показват кога се прилага достатъчен натиск (когато всички LED светлини светнат една след друга от оранжево към зелено)



9. Пуснете гърдите отново: Светлинната LED система за обратна информация при употреба ще ви помогне и тук. Ако имате подготовка и сте обучени за това, може да направите 2 спасителни вдишвания след 30 компресии

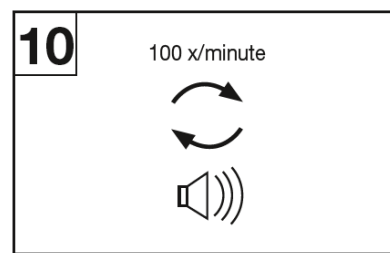

10. Повторете стъпки (8) и (9) в ритъм със звуковия сигнал, така че да сте сигурни, че сте достигнали 100 компресии на минута.

Това устройство няма ЕКГ функция.

**Правете сърдечен масаж докато няма видими признаци за живот или докато не дойде спешния доктор и той не поеме действията по оказване на първа помощ**