

Formanova P&M

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA		
BOZZA / Proof date :	n° 3	del	29 - 03 - 2013
PRODOTTO / Product :	BLEFARETTE UK/FR leaflet	CODICE / Code :	912161/01
CARTA / Paper :	GR/MQ / Gr/mq :		
F.TO POSA STESA / Size flat :	150 x 168	POSA PIEG ATA / Size folden :	150 x 42
STAMPA SU L.ATO / Printing :	BIANCA / Top side :	☒	VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Fold No. :	C M Y K		
NOTE / Notes :	F ronte: lingua INGLESE - Ret ro: lingua FRANCESE		

912457/00



30 кърпички за еднократна употреба

MEDICAL
DEVICE

За ежедневно почистване на зоната около очите

Блефарете са меки кърпичка за еднократна употреба от нетъкан текстил, чиито съставки хидратират и почистват клепачите и миглите. Блефарете са предназначени за цялостно и ежедневно почистване на деликатната зона около очите. Блефарете са особено подходящи за третиране на възпаления по ръба на клепача. Блефарете са не-омазняващи кърпички за еднократна употреба, които придават приятно усещане за свежест и чистота, не предизвикват дразнене на окото и не е необходимо измиване след употребата им.

Кърпичките Блефарете не съдържат парабени, силикон и алкохол.

Състав: карагенан гел (Ahnfeltiopsis Concinna extract); каприл/каприл глюкозид; кокоил соев полипептид; натриев хлорид; растителен глицерин; натриев бензоат; калиев сорбат; натриев дехидроацетат; дестилирана вода.

Начин на употреба:


Ежедневно почистване на очите: Отворете сашето и извадете кърпичката с чисти ръце. Разгънете напълно кърпичката и внимателно масажирате по ръба на клепача и върху миглите, като държите очите затворени.

При упорити секрети, възпаления по ръба на клепача (конюнктивит, блефароконюнктивит, ечемик) и оклузии на слъзния канал, се препоръчва да се приложат топли влажни компреси върху засегнатото място.

За да направите това, затоплете сашето като го поставите за печатано в топла вода (40°C) за около 3-5 минути.

След като бъде затоплено, отворете сашето, извадете кърпичката и като я държите сгъната, нежно масажирате засегнатата зона за 1-2 минути, като държите окото затворено.

При сърбеж или оток на клепачите сложете студени компреси на засегнатото място, за да получите облекчаващ ефект. За да направите това, охладете сашето в хладилник за поне един час. Отворете сашето и поставете кърпичката като я държите сгъната върху засегнатата зона за 1-2 минути, като държите окото затворено.

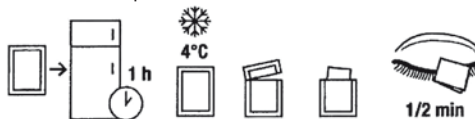

НЕ ИЗПЛАКВАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА

Предпазни мерки / Предупреждения:

- Не използвайте в случай на свръхчувствителност към някоя от компонентите на продукта.
- Не използвайте, ако сашето е повредено.
- За приготвяне на топли и студени компреси, използвайте кърпичките както е описано в листовката.
- Веднъж затоплена кърпичката трябва да се използва в рамките на няколко минути или да бъде изхвърлена.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.
- Съхранявайте на температура под 25°C.
- Не използвайте след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.
- Използвайте по една кърпичка за всяко око.
- Не замразявайте.

САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

Производител:

Farmigear S.p.A. - Via G.B. Oliva, 8 - 56121 PISA, Italy

Дата на последна редакция на текста: Март 2016

