

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте Пик Индолор Еърклиник, апарат за аерозолна терапия, проектиран и изработен по най-съвременна технология. За по-лесна употреба, моля следвайте инструкциите за подготовка и приложение. Преди да продължим Ви препоръчваме да прочетете инструкциите за употреба, за да се уверите, че напълно сте разбрали как работи апарата. Еърклиник е клас II медицинско изделие, което превръща течните лекарствени форми в аерозол, за да бъде прилаган директно в дихателната система. Пулверизаторът Вентстрим Про осигурява по-ефективна терапия, по-малка загуба на количество от лекарствения продукт и по-дълбока пенетрация в дробовите. Пулверизаторът Вентстрим Про включва чашка с два отвора, която реагира на дишането на пациента чрез разпространяване на по-голямо количество лекарство при вдишване и ограничаване на загубата. Устройството е специално разработено, за да направи лечението още по-ефективно и по-лесно, като същевременно гарантира качеството и стандартите на безопасност, типични за всички продукти на Пик Индолор. Еърклиник е надежден и лесен за употреба, и не е необходима по-специална поддръжка. Специалния въздушен филтър задържа прахта и може да бъде подменян през определен интервал от време. Еърклиник също така е снабден с регулатор на потока, като по този начин се настройва интензивността на въздушния поток в зависимост от нуждите на клиента. Комплектът Еърклиник съдържа всички необходими аксесоари: мундшук и съединителна тръба. Мундшукът осигурява по-малка загуба, така че лекарството да прониква до по-дълбоките дихателни пътища без да се отлага по лицето или по горните дихателни пътища. Аксесоарите се предлагат в практичен комплект. Благодарим Ви още веднъж, че избрахте новия Еърклиник апарат за аерозолна терапия. Сигурни сме, че ще бъдете изключително доволни от него, както и че ще имате полза от Вашата покупка.

АКСЕСОАРИ

- 1 - Вентстрим Про небулизаторна чашка
- 2 - Съединителна тръба

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА АПАРАТА

- a - Отваряща се клапа
- b - Светещ ключ On/Off
- c - Отвор за състен въздух
- d - Филтър за регулация на потока
- e - Основа на чашката с пулверизатор
- f - Щепсел
- g - Дръжка
- g - Въздушни отвори
- l - Отделение за аксесоарите
- j - Кабел



ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди употреба, прочетете внимателно информацията в този наръчник и го пазете за бъдеща справка.
- Апарат за аерозолна терапия. Следвайте инструкциите на Вашия лекар, като какъв вид лекарство да използвате, дозата, честотата и продължителността на инхалациите. Всички други приложения на апарата освен по предназначение са неправилни и следователно опасни. Артсана не може да бъде държана отговорна за дадена вреда, причинена от неправилна и неразумна употреба, или ако апаратът е използван в електрически системи, които не отговарят на правилата за безопасна работа.
- След като разпаковате апарата, проверете дали е непокътнат и дали има някаква видима щета, която би могла да се появи при транспортирането. Ако се съмнявате, не използвайте апарата, а се свържете с квалифициран електротехник.
- Плаковете материали (горби, кутия и др.) не трябва да се оставят в обсега на деца.
- Преди да свържете апарата, проверете дали основното захранване отговаря на това, което е показано върху кабела. Този кабел е разположен в долния край на апарата.
- Ако щепсела на апарата не е подходящ за главния контакт, използвайте адаптор, утвърден от държавата, където използвате апарата, или сменете щепсела с помощта на квалифициран електротехник, упълномощен от Артсана.
- Уверете се, че филтъра е сух, за да сте сигурни че апаратът работи правилно.
- Апаратът не трябва да се използва при наличието на азотен окис, кислород или упойващи вещества, които са запалими при контакт с въздуха.
- Изключете апарата и изключете от контакта след употреба и преди да добавите лекарство. Не преглъщайте чашката на пулверизатора.
- Пазете апарата и кабела далеч от топли повърхности.
- Не използвайте апарата, докато си вземате душ или вана, както и върху влажно лице или в близост до вани, мивки, умивалници и др.
- Никога не пипайте апарата с мокри или влажни ръце.
- Не изпускате и не поставяйте апарата във вода или други течности. Ако уредът бъде изпуснат във вода или други течности, незабавно отстранете щепсела. Не използвайте уреда и се консултирайте с квалифициран електротехник.
- Не запущвайте въздушните отвори при употреба.
- Не използвайте апарата, ако се чувствате сънливи.
- Деца и хора с физически и психически увреждания трябва да бъдат под контрол при употреба на апарата.
- Не използвайте други свързващи кабели и аксесоари, освен тези от комплекта.
- Поставяйте апарата в правилно положение и върху равна повърхност при употреба и при съхранение, за да се избегне изтичане на лекарството.
- Повърхността, на която поставяте устройството трябва да е свободна от предмети, които биха прекъснали притока на въздух.
- Не оставяйте устройството включено в мрежата, когато не се използва или е без надзор.
- Винаги разглобявайте преди почистване или при операции по поддръжка.
- Ако решите да не използвате повече апарата, разединете кабела и махнете щепсела, така че апарата да не може да работи. Също така Ви препоръчваме да изключите и отстраните всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца.
- За да изхвърлите аксесоарите, обект на износване, моля насочете се към подходящото законодателство. За да изхвърлите апарата, моля насочете се към директива на Европейския съюз 2002 / 96 / EC.
- Апаратът не трябва да се употребява, ако някоя от частите му е повредена или отслабена при падане или изпускане. Ако имате съмнения свържете се с квалифициран електротехник.
- В случай на неуспех или неизправна работа, изключете апарата и махнете щепсела от контакта. Не се опитвайте да отворите или да поправите апарата.

Тест за емисии	Съгласуване	Електромагнитна среда ръководство
Електростатичен разряд (ESD) IEC/EN 61000-4-2	± 6 kV при контакт ± 3 kV във въздуха	Подът трябва да е дървен, бетонен или с керамични плочки. Ако подът е покрит със синтетичен материал, относителната влажност не трябва да надвишава 30%
Електрично бързо transient / burst IEC/EN61000-4-4	± 2 kV снабдяване	Качеството на основното захранване трябва да бъде като на типични търговски или болнични условия. Ако потребителя на аерозолната терапия Еърклиник се нуждае от продължителна терапия е препоръчително участъка да е снабден с непрекъсната мощност.
Напрежение IEC/EN61000-4-5	± 1 kV характерен метод	Качеството на основното захранване трябва да бъде като на типични търговски или болнични условия. Ако потребителя на аерозолната терапия Еърклиник се нуждае от продължителна терапия е препоръчително участъка да е снабден с непрекъсната мощност.
Напрежение, кратки прекъсвания и вариации на напрежението IEC/EN 61000-4-11	<5% UT за 0,5 оборот 40% UT за 0,5 оборот 70% UT за 25 оборот <5% UT за 5 секунди	Качеството на основното захранване трябва да бъде като на типични търговски или болнични условия. Ако потребителя на аерозолната терапия Еърклиник се нуждае от продължителна терапия е препоръчително участъка да е снабден с непрекъсната мощност.
Магнитно поле IEC/EN 61000-4-8	3 A/m	Магнитното поле трябва да бъде като на типични търговски или болнични условия.
Безопасност към радиационни смущения IEC/EN 61000-4-6	3 Vrms 150kHz до 80 MHz	
Безопасност към радиационни смущения IEC/EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz до 2.5 GHz	

Забележка: Ut е главното напрежение.

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

1. Внимание! Прочетете инструкциите
2. Апарат тип B
3. Двойна изолация
4. Съгласете се с нарежданията MDD 93/42/EEC
5. Сменящ се поток



- Условия за съхранение:
6. Относителна влажност: 45% / 85%
 7. Температури: -20°C / + 70°C

"Медицинският апарат изисква специални предпазни мерки относно електромагнитната съвместимост и трябва да бъде инсталиран и пуснат в употреба според информацията, представена в ръководството на потребителя."

Този продукт се подчинява на нарежданията на Европейския съюз 2002 / 96 EC

Символът с кош за боклук с две пресечени черти, отбелязан на уреда посочва, че този продукт, в края на употребата си трябва да бъде изхвърлен по различен начин от домашните отпадъци, или като се занесе на специално отделено място за изхвърляне на електрически уреди, или да се върне на дилъра, когато закупвате друг подобен апарат. Потребителят е отговорен за това, в края на употребата, да занесе апарата на подходящо за целта място. Ако използвания апарат е изхвърлен правилно като отделен отпадък, може да бъде рециклиран, обработен и изхвърлен екологично. Така се избягва отрицателното въздействие върху околната среда и здравето и се допринася за рециклирането на материалите, необходими за продукта. За допълнителна информация относно наличните услуги за изхвърляне се свържете с местната агенция за събиране на отпадъците или с магазина, от който сте закупили апарата.

ГАРАНЦИЯ

Еърклиник има гаранция в случаите на производствен дефект в материала или направата. Гаранцията е валидна 3 години. Дефектни елементи ще бъдат сменени безплатно, само ако апарата не е поправян и ако приложените инструкции за употреба са спазвани внимателно.

Всяка намеса върху апарата от неоторизиран специалист незабавно ще анулира гаранцията.

Медицинско представителство в България :

„Булгермед ВЕ“ ООД, гр. София, ул. „Светослав Тертер“ № 24,
тел. 02/942 70 70