

Ръководство на потребителя за апарат за кръвно налягане Beurer BM 57



I. Включено в опаковката:

- Апарат за измерване на кръвно налягане
- Маншет за горната част на ръката
- 2 x LR6 AA батерии
- Торбичка за съхранение
- Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

Запазете тези инструкции за употреба за по-нататъшна употреба. Ако дадете устройството на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.

II. Предназначение на уреда:

Апаратът за измерване на кръвно налягане в горната част на ръката се използва за неинвазивно измерване и наблюдение на стойностите на артериалното кръвно налягане при възрастни. Този апарат ви позволява да измервате кръвното си налягане и пулса си бързо и лесно, да запазвате измерените стойности и да проследявате развитието и средните стойности на измерените стойности. В допълнение, ако страдате от аритмия уредът ще

ви предупреди за това. Записаните стойности се класифицират и онагледяват графично.

III. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- За да имате точни стойности за сравнение, мерете кръвното си налягане по едно и също време на денонощието.
- Не мерете кръвното си налягане 30 минути след хранене, пиене, пушене или физическо натоварване.
- Отпочинете 5 минути преди първото измерване.
- Ако искате да повторите измерването, моля изчакайте 1 минута преди да измерите кръвното си налягане отново.
- Ако не сте уверени в отчетената стойност, повторете измерването.
- Този апарат не е заместител на лекарска помощ. Не базирайте никакви медицински решения (лекарствени продукти или техните дози) на отчетените от този апарат стойности. Винаги се консултирайте със своя лекар!
- Не използвайте уреда върху новородени, върху бременни жени или пациенти с прееклампсия.
- Сърдечносъдовите заболявания могат да предизвикат неправилно отчитане на стойностите. Това важи и при много ниско кръвно налягане, диабет, нарушения на кръвообращението и аритмии, както и при тремор.
- Уредът не е предназначен за употреба от хора (вкл. деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности без надзора на възрастен, отговорен за тяхната безопасност.
- Уредът не трябва да се използва с високочестотни хирургични апарати.
- Използвайте само при хора със съответстваща на уреда обиколка в горната част на ръката.
- Обърнете внимание, че по време на напompване може да се нарушат функциите на съответния крайник.
- По време на измерване на кръвното налягане, кръвообращението не трябва да се спира за ненужно дълго време. Ако устройството не функционира правилно, махнете маншета от ръката.
- Избягвайте всякакви механични ограничения, сгъвания или огъвания на маншета.
- Не допускате продължително налягане в маншета или чести измервания. Ограничаването на кръвния поток на ръката може да причини нараняване.
- Не поставяйте маншета на ръката си, ако дадената ръка има артерии или вени, които са подложени на медицинско лечение, напр. интраваскуларна терапия или артериовенозен шънт.
- Не използвайте маншета на хора, претърпели мастектомия.

- Не поставяйте маншета върху рани, тъй като това може да предизвика допълнителни наранявания.
- Поставяйте маншета само върху горната част на ръката си. Не поставяйте маншета на други части на тялото си.
- Моля, обърнете внимание, че съхранението и прехвърлянето на данни е възможно само когато уредът имат захранване. Когато батериите на уреда се изтощят, датата и часа се нулират автоматично.
- За запазване на батериите, апаратът се изключва автоматично, ако не бъдат натискани бутони в продължение на 30 секунди.
- Устройството е предназначено само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилно или небрежно използване.
- Устройството е направено от прецизни електронни компоненти. Точността на отчетените стойности и продължителността на експлоатационния му живот зависят от внимателната му употреба.
- Пазете уреда от удар, влага, прах, големи температурни колебания и пряка слънчева светлина.
- В никакъв случай не изпускате и не удряйте това устройство.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни полета (радио системи и мобилни телефони).
- Използвайте само маншета, който е включен в комплекта (или оригинален резервен маншет). В противен случай апаратът може да отчете грешни стойности.
- Махнете батериите, ако няма да използвате уреда дълго време.
- Ако устройството не функционира правилно, махнете маншета от ръката незабавно.
- Никога не се опитвайте да поправяте този апарат сами. Всяка поправка трябва да се извършва от оторизиран технически персонал. В противен случай съществува опасност от нараняване в следствие на неправилна работа на устройството. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията на апарата невалидна.


Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане и задушаване!
- Съблюдавайте + и - поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Пазете батериите от силна топлина.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия.
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.

- Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете батериите от него.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не зареждайте батериите.
- Не използвайте презаредими батерии.
- Не разглобявайте, срязвайте или смачквайте батериите.


IV. Описание на уреда:

1. Маншет
2. Тубичка на маншета
3. Конектор на маншета
4. Дисплей
5. Бутони за Памет M1/ M2
6. СТАРТ/СТОП бутон
7. Индикатор на риска
8. Гнездо за свързване на маншета (от лявата страна)
9. Гнездо за захранването

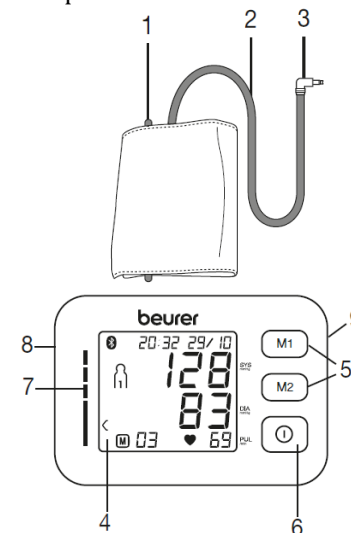

Дисплей :


1. Дата/Час
2. Систолично налягане
3. Диастолично налягане
4. Измерен пулс
5. Символ за пулс
6. Изпускане на въздух (стрелка)
7. Брой места в памет/показване на средна стойност (A), средна стойност сутрин (AM) и средна стойност следобед (PM)
8. Индикатор на риска
9. Символ за статус на батерията
10. Символ за сърдечна аритмия
11. Потребителска памет
12. Символ за Bluetooth трансфер

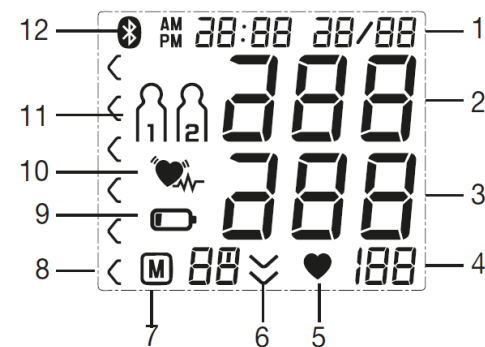


V. Подготовка за работа:

Слагане на батерии:

- Махнете капака на отделението за батерии в задната част на устройството и поставете два броя батерии 1.5 V AA (тип LR6) в него. Уверете се, че батериите са сложени с правилния си поляритет. Не използвайте презаредими батерии.
- След това затворете капака на отделението за батерии внимателно.
- На екрана започва да мига 24h. Задайте дата и час по описания по-долу начин.

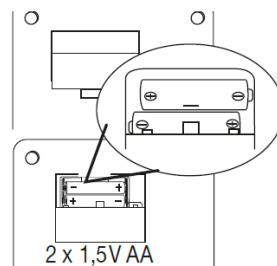

Ако индикаторът за смяна на батериите  свети постоянно вече не може да правите измервания с устройството и трябва да подмените батериите му. Когато извадите батериите от апарата, датата и часът ще бъдат нулирани. Всички запазените отчетени стойности ще се запазят.


Настройка на формата на часа, датата, часа и Bluetooth:

Важно е да настроите датата и часа. В противен случай вашите измервания няма да бъдат запазени по точен начин с час и дата.

Бележка: Ако натиснете и задържите бутона за памет M1 и M2 може да зададете стойностите по-бързо.

Натиснете и задържете бутон Старт/Стоп за 5 секунди, ако не сте поставили батериите обратно.

Настройка на формата на часа, годината, месеца, деня, часа и минутите:

- Форматът на часа започва да мига на дисплея. Чрез бутоните M1/M2 изберете формата, който желаете и потвърдете избора си чрез бутона Старт/Стоп .
- След това последователно може да настроите **годината, месеца, деня, часа и минутите**. За да настроите тези стойности, моля следвайте същите инструкции като за настройка на формата на часа.

Бележка: В 24 часовия формат, денят излиза преди месеца, а в 12 часовия формат първо излиза месеца, а след него деня.

Настройка на Bluetooth:

- Символът за Bluetooth започва да мига на екрана.
- Използвайте бутоните M1/M2 и изберете дали да активирате автоматичното Bluetooth прехвърляне (символът за Bluetooth започва

да мига) или да го деактивирате (символът за Bluetooth не се показва). Потвърдете избора си с бутона Старт/Стоп.

Бележка: Трансферът с Bluetooth намалява експлоатационния живот на батерията.

Работа на ток:


Може да използвате този апарат и на ток. За целта трябва да си поръчате захранващ кабел отделно на каталожен номер 071.95. Когато използвате уреда на ток трябва да се сигурни, че сте извадили батериите от него.



- Трябва да използвате само споменатия в тези инструкции вид захранващ кабел. В противен случай устройството може да се повреди.
- Поставете захранващата част в порта за захранване от дясната страна на апарата за кръвно налягане. Мрежовата част трябва да бъде свързана само към мрежовото напрежение, което е уточнено върху устройството.
- След това поставете захранващия адаптер към ел. контакт.
- След употреба първо извадете кабела от ел. контакт, а след това от уреда. Веднага след като направите това датата и часът ще бъдат нулирани, но запазените отчетени стойности ще се запазят.

VI. Измерване на кръвното налягане:


Устройството трябва да бъде поставено на стайна температура преди измерване. Може да направите измерването на лявата или на дясната ръка.

Позициониране на маншета

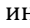- Поставете маншета върху горната част на голата си ръка – долната част на маншета трябва да е 2-3 см над свивката на лакътя, а маркучът да е позициониран централно на дланта. Кръвният поток в ръката не трябва да бъде ограничен от стегнати дрехи
- Стегнете маншета (но не прекалено) и захванете с лепенката. Трябва да можете да пхнете два пръста между маншета и ръката.
- Свържете маркуча на маншета към гнездото за свързване с маншета.
- Маншетът е подходящ размер за вас, ако индексът () е в рамките на „OK“ зоната. Ако измерването се извършва върху дясната горна част на ръката, маркучът трябва да бъде

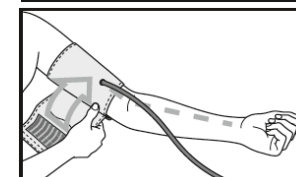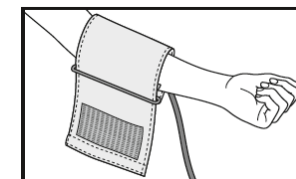


разположен от вътрешната страна на лакътя. Уверете се, че не натискате маркуча.

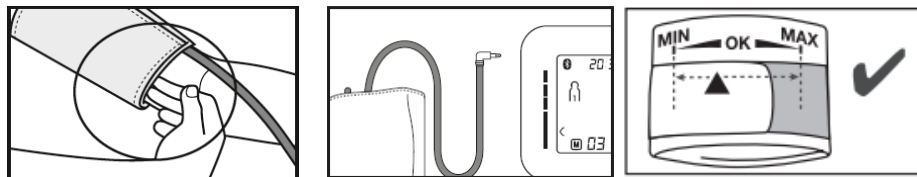

Бележка: Отчетените стойности може да бъдат различни на лявата и на дясната Ви ръка. Заради това винаги трябва да измервате кръвното си налягане на една и съща ръка. Ако стойностите се различават значително, трябва да се консултирате с вашия лекар относно коя ръка да използвате при измерване на кръвното си налягане.


Важно: Уредът трябва да се използва само с оригинален маншет, който е предназначен за обиколка на ръката 23-40 см.


Правилна поза за измерване на кръвно налягане:

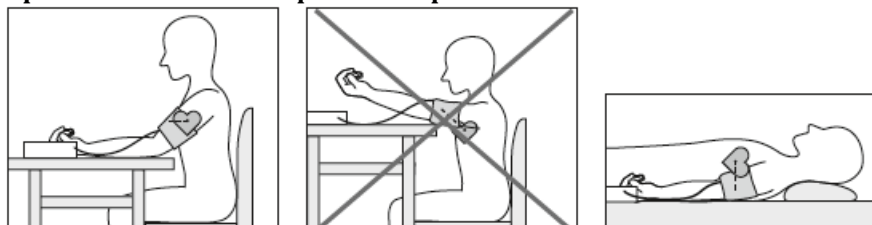






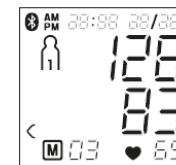
- Починете си 5 минути преди измерването.
- Можете да мерите в седнало или легнало положение на тялото като маншетът трябва да е на нивото на сърцето.
- Седнете комфортно, с подпирни ръце и гръб. Не кръстосвайте крака. Поставете стъпалата на пода.
- Не мърдайте по време на измерването и не говорете.

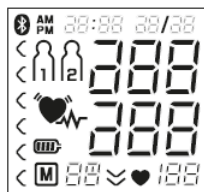
Измерване на кръвното налягане:

- Сложете маншета според описанието и приемете правилна поза, за да извършите измерването.
- Натиснете бутона **СТАРТ/СТОП**  , за да включите апарата.
- Закратко на дисплея се появяват всички икони
- Апаратът ще започне да отчита кръвното ви налягане автоматично след припл. 3 секунди. Маншетът се надува автоматично, а самото измерване се прави по време на надуването.



- Измерването може да бъде отменено по всяко време на отчитането чрез натискане на бутона **Старт/Стоп** .
- Когато уредът отчете пулса ви на екрана ще видите .
- На екрана излизат отчетените: сърдечен ритъм, систолично и диастолично налягане.
- Ако на екрана видите **EE** значи измерването е било неуспешно и трябва да го повторите.
- След това изберете желаната от вас потребителска памет като натиснете бутоните за памет **M1** или **M2**. Ако не изберете памет, отчетената стойност ще се запази в последно използваната памет. На екрана излиза избраната от вас памет –  или .
- За да изключите устройството натиснете бутона **Старт/Стоп** . Когато направите това, измерването ще се запази автоматично във вече избраната от вас потребителска памет.
- Ако забравите да изключите уреда, той ще се изключи автоматично след 1 минута. Дори в този случай измерването ще се запази във вече избраната от вас потребителска памет или в последно използваната потребителска памет.



Ако сте активирали трансфера с Bluetooth, данните ще се прехвърлят след като сте потвърдили потребителската памет и сте натиснали бутона **Старт/Стоп** .

Символът за Bluetooth започва да мига на дисплея. Устройството ще се опита да се свърже с приложението за припл. 30 секунди.

Символът за Bluetooth започва да мига, когато се установи връзка с приложението. Всички отчетени стойности се прехвърлят автоматично към приложението. Когато данните се прехвърлят успешно устройството ще се изключи автоматично.

Ако не може да се установи връзка след 30 секунди, символът за Bluetooth изчезва от екрана и устройството се изключва автоматично след 1 минута.


Моля имайте предвид, че трябва да добавите апарата за кръвно налягане към „Моите устройства“ (My devices) в приложението „beurer HealthManager“, за да може да осъществите прехвърляне. Приложението „beurer HealthManager“ трябва да бъде активирано, за да е възможно прехвърляне на данни.

Ако последните данни не излизат на вашия смартфон трябва да повторите вече описания процес на трансфер на данни.

Ако забравите да изключите устройството, то ще се изключи автоматично след 30 секунди. В подобни случаи отчетените стойности ще бъдат съхранени в последно използваната потребителска памет, а прехвърлянето ще бъде направено, когато активирате Bluetooth.

- Изчакайте поне 1 минута преди да направите ново измерване.

Отчитане на резултатите:

Сърдечна аритмия: Уредът може да улови възможна сърдечна аритмия като това се обозначава с икона . Ако иконата се появява често, отидете на кардиолог. Само лекар може да потвърди сърдечна аритмия и да ви даде инструкции относно това състояние.

Индикатор на риска: Измерванията могат да бъдат оценени и класифицирани според долната таблица. Имайте предвид, че тези данни са генерализирани, защото индивидуалните стойности на кръвното налягане варират при отделните хора и възрастови групи. Само лекар може да каже какви са вашите точни нормални стойности.

Апаратът показва в коя категория са отчетените стойности. Когато стойностите на систоличното и диастоличното налягане са в различни категории, отчита се по-високата. Например, ако систоличното налягане е високо, а диастоличното е нормално, стойността ще бъде отчетена като висока.






Категория	Систолично (в mmHg)	Диастолично (в mmHg)	Действие
3: Тежка хипертония	≥ 180	≥ 110	Потърсете лекар
2: Умерена хипертония	160-179	100-109	Потърсете лекар
1: Лека хипертония	140-159	90-99	Редовно следене от лекар
Нормално в горната граница	130-139	85-89	Редовно следене от лекар
Нормално	120-129	80-84	Самонаблюдение
Оптимално	< 120	< 80	Самонаблюдение


Източник: СЗО, 1999 (Световна Здравна Организация)

VII. Показване и изтриване на отчетени стойности:

Потребителска памет:

Резултатите от всяко успешно измерване се съхраняват заедно с датата и часа. Най-старото измерване се изтрива, когато са направени повече от 60 измервания.

- Изберете желаната от вас памет  или  чрез бутоните **M1** и **M2**, ако устройството е изключено.
 - За да видите отчетените данни за потребителска памет , натиснете бутон **M1**.
 - За да видите отчетените данни за потребителска памет , натиснете бутон **M2**.
- Средната стойност на всички измервания излиза на екрана.
- Ако сте активирали Bluetooth (символът за него ще мига на екрана) апаратът за кръвно налягане ще се опита да се свърже с приложението. Ако натиснете бутон **M1** в същото време, трансферът на данни ще бъде прекратен и средната стойност на всички сутрешни измервания ще излезе на екрана.
- Ако натиснете бутон **M2**, трансферът ще бъде прекратен и отчетените данни от потребителската памет  ще бъдат показани. Символът за Bluetooth вече не излиза на екрана. Бутоните на устройството се деактивират веднага когато се осъществи връзка и данните се прехвърлят.

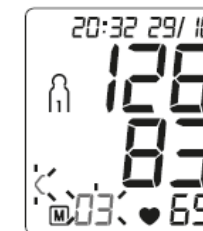

Бележка:

- Натиснете бутон **M1**, ако сте избрали потребителска памет 1.
- Натиснете бутон **M2**, ако сте избрали потребителска памет 2.

Средни стойности:

На дисплея започва да мига **A**. Средната стойност от всички измервания за дадената памет излиза на екрана.

- Натиснете бутона за дадената памет (**M1** или **M2**).

На екрана започва да мига **AM**.

Средната стойност от всички сутрешни измервания за последните 7 дни излиза на екрана (сутрешни измервания: 5 – 9 часа).




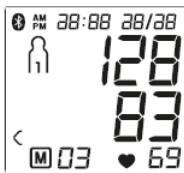
- Натиснете бутона за дадената памет (**M1** или **M2**).
На екрана започва да мига **PM**.


- Средната стойност от всички вечерни измервания за последните 7 дни излиза на екрана (вечерни измервания: 18 – 20 часа).



Индивидуални измервания:

- Когато бутонът за дадената памет (M1 или M2) е натиснат повторно, последното индивидуално измерване се показва (например измерване 03).
- Когато бутонът за дадената памет (M1 или M2) е натиснат повторно ще видите индивидуалните измервания.
- За да изключите устройството, натиснете бутона **Старт/Стоп** .



Бележка: Може да излезете от менюто по всяко време като натиснете бутона **Старт/Стоп** .

Изтриване на измервания:


- За да изчистите паметта на дадения потребител трябва първо да сте избрали дадената памет.
- Започнете извличането на средните отчетени стойности. На дисплея започва да мига **A** и средната стойност на всички отчетени стойности в дадената потребителска памет излиза на екрана.
- След това натиснете и задръжте бутоните за памет **M1** и **M2** за 2 секунди.



Всички стойности в дадената потребителска памет ще бъдат изтрети.

Изтриване на индивидуални измервания:

- За да изтриете индивидуални измервания от дадена потребителска памет първо трябва да сте избрали дадения потребител.
- Започнете извличането на индивидуалните отчетени стойности.
- Натиснете и задръжте бутоните **M1** и **M2** за 5 секунди.
- Избраната стойност ще бъде изтрита. На екрана на устройството закратко се изписва **CL 00**.
- Ако желаете да изтриете още стойности повторете горните стъпки.

Може да изключите устройството по всяко време като натиснете бутона **Старт/Стоп** .

Прехвърляне чрез ниско енергийната Bluetooth технология:

Възможно е да прехвърлите отчетените стойности, които сте запазили на устройството към смартфона си посредством ниско енергийната Bluetooth технология.

За целта ви трябва приложението "beurer HealthManager". Може да го изтеглите от Apple App Store или от Google Play.

За прехвърляне на стойностите трябва:

Ако сте активирали Bluetooth, данните ще бъдат прехвърлени автоматично след всяко измерване. Символът за Bluetooth ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея.



Стъпка 1: VM 57

Активирайте Bluetooth на вашето устройство.

Стъпка 2: приложението "beurer HealthManager"

В приложението "beurer HealthManager" добавете VM 57 в „Настройки/Моите устройства“ ("Settings/My devices").




Стъпка 3: VM 57

Направете измерване.



Стъпка 4: VM 57

Прехвърлянето на данни се осъществява веднага след измерването.

- Ако сте активирали Bluetooth измерването се прехвърля веднага след като сте потвърдили потребителската памет и сте натиснали бутона **Старт/Стоп** .

ИЛИ

Стъпка 4: VM 57

Прехвърлянето на данни се осъществява на по-късен етап.

- Отидете на режим памет (точка VII). Изберете желаната от вас потребителска памет. Прехвърлянето на данни чрез Bluetooth започва автоматично.

Бележка:

Приложението "beurer HealthManager" трябва да бъде активно, за да може да прехвърляте данни.

Ако вашият смартфон има калъф трябва да го махнете, за да сте сигурни че прехвърлянето може да бъде осъществено. Започнете прехвърлянето в приложението "beurer HealthManager".

Системни изисквания за приложението:

- iOS ≥ 9.0, Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® ≥ 4.0

VIII. Почистване и съхранение:

- Почиствайте уреда и маншета само с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте никакви почистващи препарати или разтворители.
- Не потапяйте уреда или маншета във вода и не ги мокрете.
- При съхранение на уреда махайте батериите и не поставяйте тежки предмети върху него. Не прегъвайте маншета.

IX. Съобщения за грешки:

В случай на възникване на грешки на екрана излиза **EE**.

Тези грешки може да бъдат в следствие на:

- Систоличното или диастоличното налягане не е измерено – **EE1**.
- Маншетът е повреден или е поставен прекалено стегнато или хлабаво – **EE2**.
- Налягането при напompване надвишава 290 mmHg – **EE8**.

Повторете измерването правилно. Уверете се, че маркучът на маншета е свързан правилно и че не се движите и не говорите по време на измерването. Ако е необходимо, извадете батериите и ги поставете в уреда отново, или ги сменете.

X. Регулаторна информация:



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Това устройство отговаря на всички приложими европейски и национални директиви.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

IP 22: Защитено от твърди чужди предмети с диаметър 12.5 мм или капки течност, които падат вертикално под ъгъл до 15°.

Уредът отговаря на европейския стандарт EN60601-1-2 (в съответствие с CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 и IEC 61000-4-11) и е обект на специални предпазни мерки по отношение на електромагнитната съвместимост. Моля, обърнете внимание, че преносимите и мобилните високочестотни комуникационни системи могат да попречат на това устройство.

Уредът отговаря на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия, Немския закон за медицински устройства (Medizinproduktgesetz) и стандартите EN 1060-3 (Неинвазивни сфигмоманометри, част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане) и IEC 80601-2-30 (Медицинско електрическо оборудване - Част 2-30: Специфични изисквания за безопасност и основна експлоатация на автоматизирани неинвазивни монитори за кръвно налягане).

Ако използвате уреда за търговски или медицински цели, трябва редовно да проверявате неговата точност.

Точността на този апарат за кръвно налягане е проверена внимателно, а самия апарат е разработен с цел продължителна и надеждна употреба.

Ако използвате устройството за търговски медицински цели, то трябва да бъде тествано редовно за точност с подходящи средства.

Може да изискате точни инструкции за проверка на точността на устройството от сервизния адрес.

Този уред отговаря на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО Текст от значение за ЕИП.

Електромагнитна съвместимост:

- Уредът може да се използва във всяка среда, посочена в тези инструкции за употреба, включително домашна.

- Работата на уреда може да бъде повлияна от наличието на електромагнитни смущения. Те могат да предизвикат съобщения за грешка и отказ на дисплея/уреда.
- Избягвайте използването на уреда в близост до други устройства или поставянето му върху други устройства, защото това може да доведе до неправилната им работа.
- Използването на други аксесоари, освен посочените от производителя, може да доведе до увеличаване на електромагнитното излъчване или до намаляване на електромагнитния имунитет на уреда, което да предизвика неправилна работа.
- Неспазването на горепосочените съвети може да влоши работата на устройството.

XI. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg