

Clear&Simple™

ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ - ЛЕНТИ


ПРЕДИ УПОТРЕБА:

1. Моля прочетете внимателно листовката.
2. Желателно е да си осигурите часовник наблизо, когато правите теста.
3. Подгответе чист и сух контейнер, в който да съберете проба от урината.
4. Избягвайте приема на много течности преди направата на теста.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Съберете проба от Вашата урина в чист и сух съд. Отворете фолиевата опаковка непосредствено преди употреба и извадете лентичката. Поставете тест лентата вертикално в пробата с урина, като се уверите, че стрелките сочат надолу. Нивото на урината не трябва да надвишава максималната линия, обозначена на тест лентата. Задръжте потопена лентата за 10 секунди.

КОНТРОЛНА ЛИНИЯ (C)
ТЕСТОВА ЛИНИЯ (T)

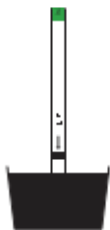

Извадете тест лентата и я оставете на равна повърхност за 5 минути, след което отчетете резултата. Докато тестът отчита ще забележите оцветяването му в бледо лилаво. В последствие това оцветяване ще избледнее и ще се появи ярка контролна линия. Ако тестът е положителен, под контролната линия ще се появи още една.



5 минути
до отчитане
на резултата

РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

ТЕСТОВА ЛИНИЯ (T) КОНТРОЛНА ЛИНИЯ (C)



БРЕМЕННА СТЕ


Ако на тест лентата се появят две цветни линии означава, че сте бременна. Възможно е едната линия да е по-бледа от другата. Наличие на изключително бледа линия се свързва с много ранна бременност, при която нивата на hCG хормона са все още ниски. Вижте въпроси 5 и 7 от секция „Често задавани въпроси“.

НЕ СТЕ БРЕМЕННА



При наличие на една линия на тест лентата резултатът е отрицателен и вероятно няма наличие на бременност, или тествате прекалено рано. В случай, че имате съмнение, че е възможно да сте бременна, повторете тестването с нова тест лента след 48 часа. Вижте въпроси 6 и 7 от секция „Често задавани въпроси“.

НЕВАЛИДЕН РАЗУЛТАТ

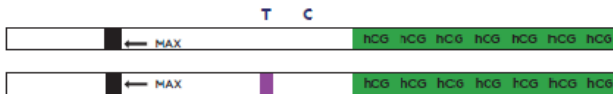

Ако не се появи нито една линия, или се появи само тестовата линия означава, че тестът е невалиден. Това обикновено се случва ако не намокрите достатъчно добре тест лентата. В този случай повторете тестването с нова тест лента, като се уверите, че я задръжте за поне 10 секунди в колектора с урина. Вижте въпрос 4 от секция „Често задавани въпроси“.

ВАЖНО

Отчетете резултата след 5 минути от направата на теста. Всякакви промени в резултата след това време не бива да се зачитат. Изхвърлете използвания тест с нормалните битови отпадъци на домакинството.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. Как работи тестът за бременност Clear&Simple?

При жена, която не е бременна хормонът hCG (Human Chorionic Gonadotropin) нормално присъства в урината в много ниски нива (обикновено 5mIU/ml). При наличие на бременност, женското тяло произвежда значителни количества от този хормон. До времето на първия ден от закъснението на менструацията Ви, този хормон вече би трябвало да е достигнал до нива, които да бъдат засечени от теста. Този тест отчита hCG хормона в урината при стойност от 20mIU/ml.

2. Кога мога да направя теста?

Можете да се тествате по-рано от 4 дни преди очакваната дата на менструацията Ви. Ако правите теста преди закъснението, Ви съветваме да използвате първата урина за деня, тъй като тя съдържа по-голямо количество от hCG хормона. Ако се тествате в дните след закъснението на менструацията Ви, може да направите теста по всяко време на деня.

3. Колко точен е тестът Clear&Simple?

В лабораторни условия тестовете Clear&Simple показват точност от над 99% при употреба в първия ден от закъснението на менструацията.

4. Какво да направя ако тестът е невалиден?

Ако не се появят никакви линии, или се появи само тестовата линия, без наличие на контролна такава, то тестът е невалиден. Това обикновено се случва ако тестът не е бил потопен достатъчно време в контейнера с урина. В този случай повторете тестването с нова лента, като се уверите, че я задържате за поне 10 секунди в контейнера с урина, за да може да се навлажни достатъчно.

5. Какво да направя ако тестът ми е положителен (бременна съм)?

Положителният резултат означава, че в урината Ви са били засечени нива над 20mIU/ml на hCG хормона.

Необходимо е да се обърнете към Вашия лекар, който може да Ви насочи към следващите стъпки.

6. Какво да направя ако тестът ми е отрицателен (не съм бременна)?

Ако резултатът от теста е отрицателен вероятно не сте бременна, или сте в много ранна бременност, при която нивата на hCG хормона не са достатъчно високи, за да бъдат отчетени от този тест.

Има вероятност да не сте калкулирали правилно първия ден от закъснението на менструацията Ви. Ако сте тествали по-рано, изчакайте 48 часа и направете нов тест. Ако Вашата менструация закъснява, тествайте отново след 72 часа с нова тест лента. Ако тогава отново имате отрицателен резултат и все още нямате наличие на менструация, е желателно да посетите Вашия лекар.

7. Какво да направя ако не съм сигурна какъв е резултатът от теста?

Ако има наличие на 2 линии, то тестът Ви е положителен (бременна сте). Контролната линия (C) трябва да е силно оцветена в лилаво. Тестовата линия (T) може да изглежда по същия начин като контролната (Диаграма А), или може да е по-бледа (Диаграма В). И в двата случая размерът и ширината на двете линии са еднакви. Ако не сте сигурна за резултата, изчакайте 48 часа и повторете теста с нова тест лента.

8. Има ли фактори, които могат да повлияят на резултата?

Тестването прекалено скоро след употребата на лекарства за фертилитет, които съдържат hCG хормона, може да даде подвеждащи резултати. Ако наскоро сте спряла да приемате хормонални контрацептиви, или използвате средства за фертилитет като clomiphene citrate, Вашата менструация може да бъде нередовна, което да Ви подведе да тествате прекалено рано.

Ако наскоро сте била бременна (дори и детето да е родено преди термин) е възможно да имате фалшив положителен резултат. Извънматочна бременност, кисти на яйчника, менопауза и някои много рядки заболявания могат да доведат до отчитането на подвеждащ резултат.

Ако имате положителен резултат, но в следствие не се потвърди бременност, е възможно да сте направила спонтанен аборт в ранните етапи на бременността.

При някои жени, които са бременни след 6 г.с. е възможно да се получат некоректни резултати (2 бледи линии), поради много високите нива на hCG хормона (т.нар. hook effect).

Ако получите неочаквани резултати е желателно да ги обсъдите с Вашия лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Да се използва само за in vitro диагностика (тестът НЕ е предназначен за вътрешна употреба)
2. Не използвайте теста след изтичането на срока му на годност, маркиран на опаковката.
3. Всеки тест за бременност е предназначен за еднократна употреба. Не използвайте един и същи тест повторно.

4. Не използвайте теста ако защитното му фолио е разкъсано или повредено.
5. След като защитното фолио бъде отворено, тестът трябва да се използва веднага.
6. ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!
7. Не замръзвайте.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКАТА:

	Не използвайте повторно		Внимание, прочетете инструкциите за употреба		Партиден номер
	Съхранявайте при температура между 4 и 30°C		Използвайте преди изтичане на срока на годност		Тест за in vitro диагностика (не е за вътрешна употреба)
	Да се пази от влага		Да се пази от пряка слънчева светлина		Съдържа тестове достатъчни за <n> на брой тествания



Производител: Healthpoint Ltd,
11 Darwin Court, Blackpool Technology Park
Blackpool, England, FY2 0JN.
Дистрибутор: "Р и КО Дистрибушън" ЕООД,
гр. София, бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 30-32,
ет.7, тел.0889811335;
email: office@nasopure.bg
www.clearandsimple.bg