

Clear&Simple™

ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА


ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ - ПИСАЛКА

ПРЕДИ УПОТРЕБА:

1. Моля прочетете внимателно листовката.
2. Желателно е да си осигурите часовник наблизко, когато правите теста.
3. Не е необходимо да събирате урина в съд, тъй като тестът може да се използва директно под струята докато уринирате, но ако все пак решите да използвате такъв, уверете се, че е чист и сух.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Отворете фолиевата опаковка непосредствено преди употреба и извадете писалката. Издърпайте пластмасовия накрайник, за да се покаже абсорбиращият връх. Дръжте писалката, така че върхът ѝ да сочи надолу и го поставете под струята с урина, или го потопете в съд с урина за около 10 секунди.

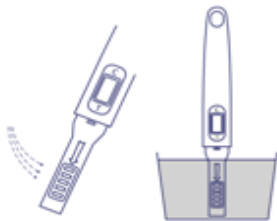

2. Поставете отново пластмасовия накрайник и оставете теста на равна повърхност. Отчетете резултата след 5 минути. Докато тестът отчита ще забележите оцветяването му в бледо лилаво. В следствие това оцветяване ще избледнее и ще се появи ярка контролна линия. Ако тестът е положителен, под контролната линия ще се появи още една.




5 минути
до отчитане
на резултата

РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

БРЕМЕННА СТЕ

Ако в прозореца на теста се появят две цветни линии означава, че сте бременна. Възможно е едната линия да е по-бледа от другата. Наличие на изключително бледа линия се свързва с много ранна бременност, при която нивата на hCN хормона са все още ниски. Вижте въпроси 5 и 7 от секция „Често задавани въпроси“.

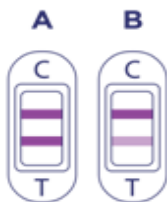

НЕ СТЕ БРЕМЕННА

При наличие на една линия в прозореца на теста резултатът е отрицателен и вероятно няма наличие на бременност, или тестът е прекалено рано. В случай, че имате съмнение, че е възможно да сте бременна, повторете тестването с нова писалка след 48 часа. Вижте въпроси 6 и 7 от секция „Често задавани въпроси“.




КОНТРОЛНА ЛИНИЯ (C)

ТЕСТОВА ЛИНИЯ (T)

НЕВАЛИДЕН РЕЗУЛТАТ

Ако не се появи нито една линия, или се появи само тестовата линия означава, че тестът е невалиден. Това обикновено се случва ако не намокрите достатъчно добре абсорбиращия връх. В този случай повторете тестването с нова писалка, като се уверите, че задържате теста за поне 10 секунди под струята с урина. Вижте въпрос 4 от секция „Често задавани въпроси“.

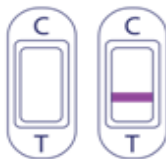

ВАЖНО

Отчетете резултата след 5 минути от направата на теста. Всякакви промени в резултата след това време не бива да се зачитат. Изхвърлете използвания тест с нормалните битови отпадъци на домакинството.



5 минути
до отчитане
на резултата

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. Как работи тестът за бременност Clear&Simple?

При жена, която не е бременна хормонът hCG (Human Chorionic Gonadotropin) нормално присъства в урината в много ниски нива (обикновено 5mIU/ml). При наличие на бременност, женското тяло произвежда значителни количества от този хормон. До времето на първия ден от закъснението на менструацията Ви, този хормон вече би трябвало да е достигнал до нива, които да бъдат засечени от теста. Този тест отчита hCG хормона в урината при стойност от 20mIU/ml.

2. Кога мога да направя теста?

Можете да се тествате по-рано от 4 дни преди очакваната дата на менструацията Ви. Ако правите теста преди закъснението, Ви съветваме да използвате първата урина за деня, тъй като тя съдържа по-голямо количество от hCG хормона. Ако се тествате в дните след закъснението на менструацията Ви, може да направите теста по всяко време на деня.

3. Колко точен е тестът Clear&Simple?

В лабораторни условия тестовите Clear&Simple показват точност от над 99% при употреба в първия ден от закъснението на менструацията.

4. Какво да направя ако тестът е невалиден?

Ако не се появят никакви линии в прозореца на теста, или се появи само тестовата линия, без наличие на контролна такова, то тестът е невалиден. Това обикновено се случва ако абсорбиращият връх не е бил изложен достатъчно време под струята урина. В този случай повторете тестването с нова писалка, като се уверите, че я задържате за поне 10 секунди под струята урина, за да може да се навлажни достатъчно.

5. Какво да направя ако тестът ми е положителен (бременна съм)?

Положителният резултат означава, че в урината Ви са били засечени нива над 20mIU/ml на hCG хормона.

Необходимо е да се обърнете към Вашия лекар, който може да Ви насочи към следващите стъпки.

6. Какво да направя ако тестът ми е отрицателен (не съм бременна)?

Ако резултатът от теста е отрицателен вероятно не сте бременна, или сте в много ранна бременност, при която нивата на hCG хормона не са достатъчно високи, за да бъдат отчетени от този тест.

Има вероятност да не сте калкулирали правилно първия ден от закъснението на менструацията Ви. Ако сте тествали по-рано, изчакайте 48 часа и направете нов тест. Ако Вашата менструация закъснява, тествайте отново след 72 часа с нова писалка. Ако тогава отново имате отрицателен резултат и все още нямате наличие на менструация, е желателно да посетите Вашия лекар.

7. Какво да направя ако не съм сигурна какъв е резултатът от теста?

Ако има наличие на 2 линии, то тестът Ви е положителен (бременна сте). Контролната линия (C) трябва да е силно оцветена в лилаво. Тестовата линия (T) може да изглежда по същия начин като контролната (Диаграма А), или може да е по-бледа (Диаграма В). И в двата случая размерът и ширината на двете линии са еднакви. Ако не сте сигурна за резултата, изчакайте 48 часа и повторете тестването с нова писалка.

8. Има ли фактори, които могат да повлияят на резултата?

Тестването прекалено скоро след употребата на лекарства за фертилитет, които съдържат hCG хормона, може да даде подвеждащи резултати. Ако наскоро сте спряла да приемате хормонални контрацептиви, или използвате средства за фертилитет като chlophenone citrate, Вашата менструация може да бъде нередовна, което да Ви подведе да тествате прекалено рано.

Ако наскоро сте била бременна (дори и детето да е родено преди термин) е възможно да имате фалшив положителен резултат. Извънматочна бременност, кисти на яйчника, менопауза и някои много рядки заболявания могат да доведат до отчитането на подвеждащ резултат.

Ако имате положителен резултат, но в следствие не се потвърди бременност, е възможно да сте направила спонтанен аборт в ранните етапи на бременността.

При някои жени, които са бременни след 6 г.с. е възможно да се получат некоректни резултати (2 бледи линии), поради много високите нива на hCG хормона (т.нар. hook effect).

Ако получите неочаквани резултати е желателно да ги обсъдите с Вашия лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Да се използва само за in vitro диагностика (тестът НЕ е предназначен за вътрешна употреба)
2. Не използвайте теста след изтичането на срока му на годност, маркиран на опаковката.
3. Всеки тест за бременност е предназначен за еднократна употреба. Не използвайте един и същи тест повторно.

4. Не използвайте теста ако защитното му фолио е разкъсано или повредено.
5. След като защитното фолио бъде отворено, тестът трябва да се използва веднага.
6. ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!
7. Не замръзвайте.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКАТА:

	Не използвайте повторно		Внимание, прочетете инструкциите за употреба		Партиден номер
	Съхранявайте при температура между 4 и 30°C		Използвайте преди изтичане на срока на годност		Тест за in vitro диагностика (не е за вътрешна употреба)
	Да се пази от влага		Да се пази от пряка слънчева светлина		Съдържа тестове достатъчни за <n> на брой тествания



Производител: Healthpoint Ltd,
11 Darwin Court, Blackpool Technology Park
Blackpool, England, FY2 0JN.
Дистрибутор: "Р и КО Дистрибушън" ЕООД,
гр. София, бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 30-32,
ет.7, тел.0889811335;
email: office@nasopure.bg
www.clearandsimple.bg

V6286201017